

機械器具(06) 呼吸補助器  
高度管理医療機器  
汎用人工呼吸器 70561000 (二相式気道陽圧ユニット 36990000)  
**「NIPネーザルV」の付属品**  
FiO<sub>2</sub>センサ

【形状、構造及び原理等】


1. 外観図



FiO<sub>2</sub>センサ



外部ケーブル

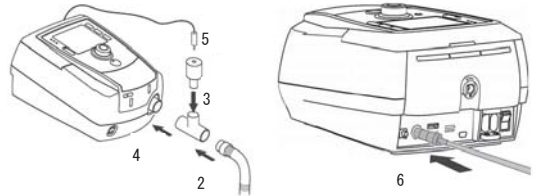

(2) 以降の操作は「NIPネーザルV」本体の操作に準ずる。

2. 構成

- (1) FiO<sub>2</sub>センサ
- (2) 外部ケーブル

3. 寸法(長さ)

- (1) FiO<sub>2</sub>センサ : 69mm
- (2) 外部ケーブル : 425mm

\* 4. 使用環境

以下のような環境に設置し使用すること。

- (1) 周囲温度 : -20～50℃
- (2) 相対湿度 : 0～99% (結露のないこと)
- (3) 気圧 : 0.5～2.0 bar (7.25～29 psi)

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

院内および在宅における、  
自発呼吸のある、成人および小児(13kg 以上)の  
呼吸不全に対する呼吸補助を目的とする。  
生命維持を目的とするものではない。

【使用方法等】

1. 使用方法

(1) 使用前の操作

本品をはじめて使用する場合

- ① 本品のキャップをはずし、15分間放置する。
- ② 15分後、本品にキャップを取り付ける。



本体への接続

- ① 本体の電源が入っていないことを確認する。
- ② エアチューブをT字形アダプタに接続する。
- ③ 本品をT字形アダプタに接続する。
- ④ T字形アダプタの他端を本体のエアチューブ接続口に接続する。
- ⑤ 外部ケーブルを本品に接続する。
- ⑥ 外部ケーブルの他端を本体後部のFiO<sub>2</sub>センサ接続口に接続する。
- ⑦ 較正および測定を開始する。

【使用上の注意】

- 治療開始前に本体の高FiO<sub>2</sub>アラームおよび低FiO<sub>2</sub>アラームがONに設定されていることを確認すること。
- 本品を滅菌しないこと。また、エチレンオキシドや過酸化水素等の薬品を使用しないこと。
- 本品は本体に記載の使用期限までに使用を開始し、使用開始後12カ月を目安に交換すること。

<重要な基本的注意>

- \* ● 本品に衝撃を与えないこと。
  - \* ● 廃棄の際には各自治体の廃棄方法に従うこと。[本品には有害な物質(鉛)が含まれている。]
  - \* ● 本品を焼却しないこと。[有害ガスが発生することがある。]
- <相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関する事)>
- \* ● 本品を加湿器と併用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 使用期限

- 本体に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

レスメド株式会社

- \* TEL03-5829-4410

製造業者:

- \*\* ResMed Pty Ltd / レスメド ピーティーワイ リミテッド(オーストラリア)