


機械器具(06) 呼吸補助器
高度管理医療機器
汎用人工呼吸器 70561000 (二相式気道陽圧ユニット 36990000)

「クリーンエア VELIA」の付属品 エアチューブ

【形状、構造及び原理等】

1. 外観図

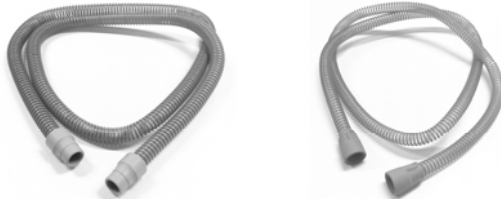

(2m/3m)

(スリム)

2. 構成

エアチューブ (2m/3m/スリム)

3. 寸法

種類	長さ
2m	2000mm
3m	3000mm
スリム	1800mm

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

院内および在宅における、
自発呼吸のある、成人および小児(13kg 以上)の
呼吸不全に対する呼吸補助を目的とする。
生命維持を目的とするものではない。

*【使用方法等】

1. 使用前の操作

(1) 非侵襲的治療


[加湿器を使用しない場合]

- ① 本体を水平な場所に置く。
- ② AC 電源コードを本体後部に接続する。
- ③ AC 電源コードの他端を AC コンセントに差し込む。
- ④ 抗菌フィルタを使用の場合(複数患者間使用)には、エアチューブ接続口に接続する。
- ⑤ 本品をエアチューブ接続口あるいは抗菌フィルタに接続する。
- ⑥ 人工呼吸器用マスク(以下マスクと記載)を本品の他端に接続する。

[加湿器を使用する場合]

- ① 本体を水平な場所に置く。
- ② 本体に加湿器を取り付ける。
- ③ AC 電源コードを本体後部に接続する。
- ④ AC 電源コードの他端を AC コンセントに差し込む。
- ⑤ 本品をエアチューブ接続口(加湿器)に接続する。
- ⑥ マスクを本品の他端に接続する。

非侵襲的使用

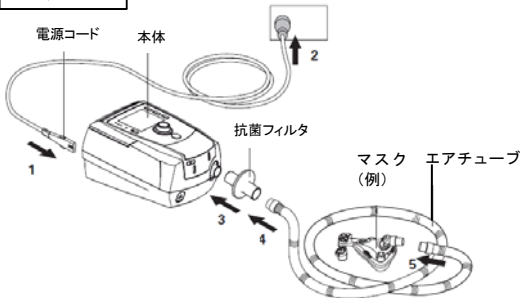


(2) 侵襲的治療

- ① 本体を水平な場所に置く。
- ② AC 電源コードを本体後部に接続する。
- ③ AC 電源コードの他端を AC コンセントに差し込む。

- ④ 抗菌フィルタをエアチューブ接続口に接続する。
- ⑤ 外部加湿加湿器を使用の場合には、抗菌フィルタの後に接続する。
- ⑥ 本品を抗菌フィルタあるいは外部加湿加湿器に接続する。
- ⑦ リークポートを本品の他端に接続する。
- ⑧ 加湿加湿フィルタを外部加湿加湿器の代わりに使用の場合には、リークポートに接続する。
- ⑨ 気切用インターフェース(カテーテルマウント等)をリークポートあるいは加湿加湿フィルタの他端に接続する。

優襲的使用

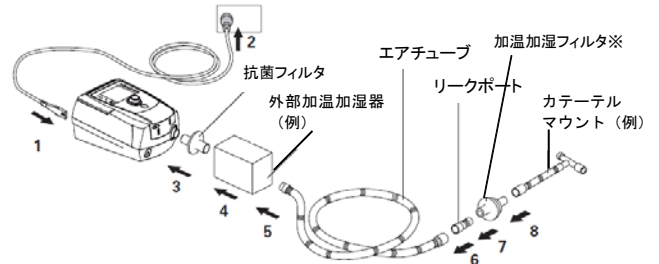

※「外部加湿加湿器」と加湿加湿フィルタはいずれか一方を使用する。決して両方を併用しないこと。

2. 以降の操作は「クリーンエア VELIA」本体の操作に準ずる。

*【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・ 運転中本体の空気取込み口あるいは本品を塞がないこと。[装置が過熱することがある。]

**【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書を参照すること。

1. 使用者による保守点検事項

クリーニングおよびメンテナンス

(1) 毎日

- ① 本品を取り外し、次回使用時まで清潔で乾燥した場所に吊り下げておく。

(2) 毎週

- ① 本品を取り外し、ぬるま湯と中性洗剤で洗う。
- ② よくすすぎ、吊り下げて乾燥させる。

(3) 複数患者間においての使用

病院、クリニックおよびスリープラボ等の医療施設において、本品を複数患者間に使用する場合には、**製造元**が推奨する方法、または、各医療施設にて定められた方法にて消毒すること。

** **なお、製造元**では下記の消毒条件における製品の耐久性を確認している。

方法	内容	耐久回数
薬液消毒	フタラール 0.55%液 12分	100回
熱湯消毒	75℃ 30分	100回

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:

レスメド株式会社
TEL03-5829-4410

製造元:

** ResMed Pty Ltd /
レスメド ピーティーワイ リミテッド(オーストラリア)

発売元(連絡先):

フクダ電子株式会社
〒113-8483 東京都文京区本郷3-39-4

緊急連絡先:

装置に貼付してある連絡先