

機械器具(06) 呼吸補助器

高度管理医療機器

* 汎用人工呼吸器 70561000(二相式気道陽圧ユニット 36990000)

「クリーンエア VELIA」の付属品

T字形アダプタ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

*1. 外観図



2. 寸法

長さ: 79mm

【使用目的又は効果】

1. 使用目的


院内および在宅における、
自発呼吸のある、成人および小児(13kg 以上)の
呼吸不全に対する呼吸補助を目的とする。
生命維持を目的とするものではない。

【使用方法等】

1. 使用前の操作

- ① エアチューブを本品に接続する。
- ② FiO₂センサを本品に接続する。
- ③ 本品の他端を本体のエアチューブ接続口に接続する。
- ④ 外部ケーブルをFiO₂センサに接続する。
- ⑤ 外部ケーブルの他端を本体後部のFiO₂接続口に接続する。
- ⑥ 較正及び測定を開始する。

2. 以降の操作は「クリーンエア VELIA」本体の操作に準ずる。

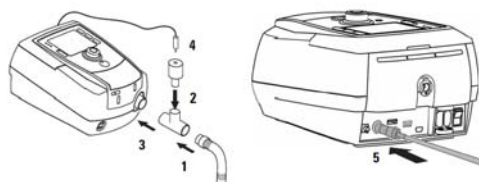

*【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 使用期限

- ・包装袋に記載

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:

レスメド株式会社
TEL03-5829-4410

製造元:

** ResMed Pty Ltd /
レスメド ピーティイーワイ リミテッド(オーストラリア)

発売元(連絡先):

フクダ電子株式会社
〒113-8483 東京都文京区本郷3-39-4

緊急連絡先:

装置に貼付してある連絡先