

機械器具(06) 呼吸補助器

高度管理医療機器

\* 汎用人工呼吸器 70561000(二相式気道陽圧ユニット 36990000)

## 「クリーンエア VELIA」の付属品 低圧酸素コネクタ

### 【形状、構造及び原理等】

#### 1. 外観図



#### 2. 寸法

長さ: 31mm

### 【使用目的又は効果】

#### 1. 使用目的

院内および在宅における、  
自発呼吸のある、成人および小児(13kg 以上)の  
呼吸不全に対する呼吸補助を目的とする。  
生命維持を目的とするものではない。

### \*【使用方法等】

#### 1. 使用前の操作

- ① 本品を本体の酸素コネクタ接続口に接続する。
  - ② 本品の他端に酸素供給用チューブを接続する。
2. 以降の操作は「クリーンエア VELIA」本体の操作に準ずる。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 酸素を使用する場合、本体が停止している間は、酸素も止めること。[本体が動作していない場合に、酸素が流れると本体内に酸素が充満し、火災が発生する危険がある]
- 酸素を使用する場合、患者回路と酸素供給源は、点火源(電気機器等)から2m以上離すこと。
- 酸素を使用する際には、医療用の酸素供給源を使用すること。
- 酸素には可燃性がある。喫煙中または直火のある場所では酸素を使用しないこと。酸素は換気の良い場所でのみ使用すること。

### \*【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 可燃性麻酔ガスおよび高濃度酸素環境雰囲気下、その他可燃性や爆発のおそれがある物質の存在する環境では、使用しないこと。[爆発および火災発生危険がある。]

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:

レスメド株式会社  
TEL03-5829-4410

製造元:

\*\* ResMed Pty Ltd /  
レスメド ピーティーワイ リミテッド(オーストラリア)

発売元(連絡先):

フクダ電子株式会社  
〒113-8483 東京都文京区本郷3-39-4

緊急連絡先:

装置に貼付してある連絡先