

機械器具(06)呼吸補助器
高度管理医療機器
持続的自動気道陽圧ユニット(37234000)
AirSense 10 オート の付属品
チューブエルボコネクタ

【形状・構造及び原理等】

1. 外観



2. 寸法

呼吸補助装置接続部内径:	22.37±0.04 mm
エアチューブ接続部外径:	22.37±0.04 mm
呼吸補助装置接続部内径	ISO 5356-1 : 1996
接合強度:	(JIS T 7201-2-1 : 1999)に準拠
エアチューブ接続部外径	ISO 5356-1 : 1996
接合強度:	(JIS T 7201-2-1 : 1999)に準拠

3. 作動原理

本装置は、呼吸補助装置から発生する加圧空気を患者に供給する。

【使用目的又は効果】

本装置は、医療施設および在宅において、体重 30kg 以上の患者に対して閉塞性睡眠時無呼吸の治療を目的として使用する。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 本装置の呼吸補助装置接続部を、呼吸補助装置のエアアウトレットポートに接続する。
- 2) 本装置のエアチューブ接続部にエアチューブを接続する。

2. 使用後の操作

- 1) 本装置からエアチューブを取り外し、本装置を呼吸補助装置から取り外す。
- 2) クリーニングは中性洗剤を使用し、ぬるま湯で手洗りする。洗浄後は、よく洗剤をすすいで陰干しする。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 本装置の呼吸補助装置接続部と呼吸補助装置のエアアウトレットポートとの接続強度を確保するため、エアアウトレットポートが ISO 5356-1 : 1996 (JIS T 7201-2-1 : 1999) に準拠した呼吸補助装置を使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者:

レスメド株式会社
TEL 03-5829-4410

製造業者:

- * ResMed Pty Ltd/ レスメド ピーティーワイ リミテッド
(オーストラリア)



社内管理用 (S18P13-2)