


# レスメド AirMini の付属品

## エアチューブ / マスクコネクタ

### 【形状、構造及び原理等】


#### 1. 外観図

- ・ エアチューブ

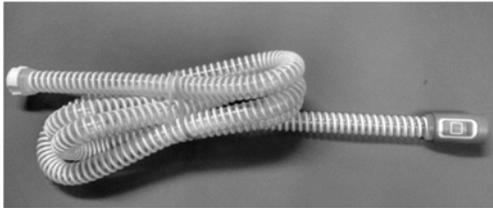


- ・ マスクコネクタ


#### ① フルフェイスマスク用

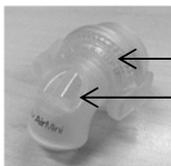

#### ② ネーザルマスク用

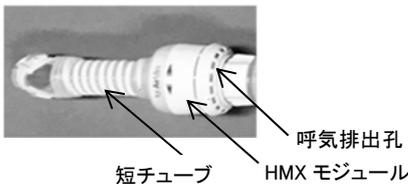

#### ③ ピローマスク用

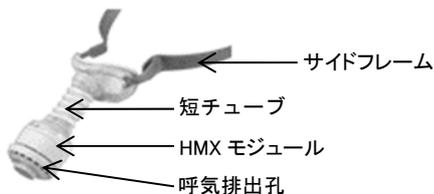

#### 2. 寸法

- ・ エアチューブ: 全長: 1,870mm±15%
- ・ マスクコネクタ
  - ① フルフェイスマスク用  
エアチューブ接続部外径: 22mm±15%
  - ② ネーザルマスク用  
短チューブ長さ: 80mm±15%
  - ③ ピローマスク用  
短チューブ+サイドフレーム長さ: 175mm±15%

### 【使用目的又は効果】

#### 1. 使用目的

本装置は、自動調節機能を有し、医療施設および在宅において、体重30kg以上の患者に対して閉塞性睡眠時無呼吸の治療を目的として使用する。

### 【使用方法等】

#### 1. 使用前および使用時の操作

- ① エアチューブをエアチューブ接続口に接続する。マスクコネクタをエアチューブの他端に接続する。
- ② 必要に応じて、HMX をマスクコネクタに挿入する。
- ③ 人工呼吸器用マスク(以下マスクと記載)を装着し、マスクコネクタに接続する。

#### 2. 併用医療機器

本申請には含まれないが、本装置と組み合わせて使用する医療機器を下表に示す。

一般的名称	販売名	承認/認証/ 届出番号
人工呼吸器用マスク	AirFit P10マスク	13B1X10062000034
人工呼吸器用マスク	AirFit N20マスク	13B1X10062000051
人工呼吸器用マスク	AirFit F20マスク	13B1X10062000052
人工呼吸器用マスク	AirFit F30マスク	13B1X10062000054

### 【使用上の注意】

#### <重要な基本的注意>

1. エアチューブ、マスクコネクタの AA 安全弁・呼気排出孔に損傷・汚れ等が無いことを確認すること。[安全機能が正しく働かないことがある]

### \*\* 【保管方法及び有効期間等】

#### \*\* 1. 耐用期間

\*\* 6ヶ月[自己認証による。]

#### \*\* 2. 貯蔵・保管上の注意事項

\*\* 直射日光を避け、以下の環境で保管すること。

\*\* ・ 周囲温度: -20℃~60℃

\*\* ・ 相対湿度: 5%~95%、結露なきこと。

\*\* ・ 気圧: 700~1.060hPa

### 【保守・点検に係る事項】

詳細については本体の取扱説明書を参照すること。

使用者による保守点検事項

#### (1) 毎日

1. エアチューブを干して内側を乾燥させる。ヒビ割れを防ぐためまっすぐに陰干しにする。
2. マスク等に、破損箇所や傷んでいる箇所がないか確認し、マスクコネクタを洗浄する。

#### (2) 毎週

1. エアチューブ洗浄。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者:

レスメド株式会社  
TEL 03-5829-4410

製造業者:

\* ResMed Pty Ltd / レスメド ピーティーワイ リミテッド  
(オーストラリア)



社内管理用(S20P12-4)