

機械器具(06) 呼吸補助器
高度管理医療機器
持続的自動気道陽圧ユニット(37234000)

レスメドAirMiniの付属品

再使用禁止

HMX

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止[滅菌できないため]

製造業者:

- * ResMed Pty Ltd / レスメド ピーティーワイ リミテッド
(オーストラリア)

【形状、構造及び原理等】

1. 外観図


① HumidX

** ネーザルマスク用・ピローマスク用 AirFit F20 マスク用



②HumidX Plus

** ネーザルマスク用・ピローマスク用

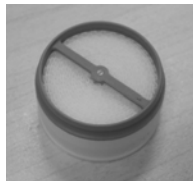

3. 作動原理

本品は、患者の呼気中の湿度を保持し、吸気時に患者の気道に戻し加湿し、患者の気道の乾燥を軽減する。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

本装置は、自動調節機能を有し、医療施設および在宅において、体重30kg以上の患者に対して閉塞性睡眠時無呼吸の治療を目的として使用する。

【使用方法等】

1. 使用方法

本品をマスクコネクタに挿入する。

【使用上の注意】

1. 洗浄できない。

【保守・点検に係る事項】

詳細については本体の取扱説明書を参照すること。

使用者による保守点検事項

(1) 毎日

1. 破損箇所や汚れやほこりによる目詰まりがない確認する。
2. 本体運転中以外は、HMXをマスクコネクタから毎回取り出し、次回使用するまで清潔で乾燥した場所に保管すること。

(2) 毎月

1. 開封から30日以内に新品と交換すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者:

レスメド株式会社

TEL 03-5829-4410