


機械器具(06) 呼吸補助器
高度管理医療機器 二相式気道陽圧ユニット 36990000
「レスメドAirCurve 10 CS-A」の付属品
エアチューブ

【形状、構造及び原理等】

1. 外観図

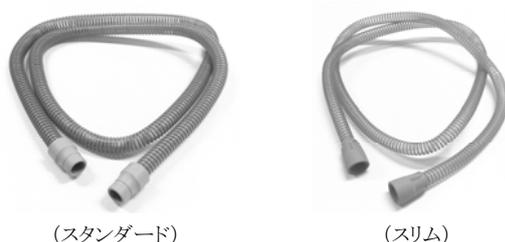

(スタンダード)

(スリム)

2. 構成

エアチューブ(スタンダード/スリム)

3. 寸法

種類	長さ
スタンダード	2000mm
スリム	1800mm


【使用目的又は効果】

1. 使用目的

本装置は医療施設および在宅における、自発呼吸のある30kg以上の患者への呼吸補助を目的として使用する。

【使用方法等】

1. 使用前の操作

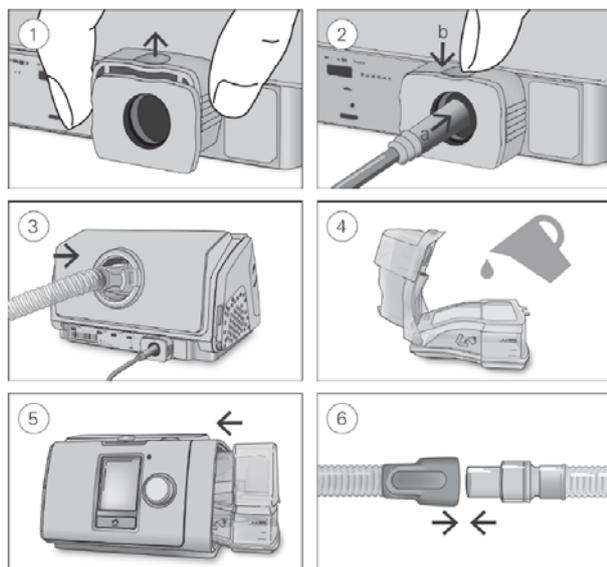

- ① 本体を水平な場所に置き、本体の電源コードクリップを引き上げ開ける。
- ② ACアダプタのDC電源プラグ(a)を本体に接続し、電源コードクリップ(b)を押し下げて固定する。ACアダプタの他端をコンセントに差し込む。
- ③ エアチューブまたはチューブエルボコネクタをエアチューブ接続口に接続する。
- ④ 水チャンバーを開けて、最高水位まで水を入れる。
- ⑤ 水チャンバーを閉じ、本体の側面に挿入する。
- ⑥ エアチューブの他端を人工呼吸器用マスクに接続する。

以降の操作は、本体の操作に準ずる。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・運転中エアチューブを塞がないこと。[本体が過熱することがある。]

【保守・点検に係る事項】

詳細については、本体の取扱説明書を参照すること。

1. 使用者による保守点検事項

- (1) 毎日
エアチューブを干して内側を乾燥させる。ヒビ割れを防ぐためまっすぐに陰干しにする。
- (2) 毎週
① 中性洗剤を使用して、ぬるま湯でエアチューブを洗う。
② エアチューブをよくすすぎ、直射日光や熱のあたらない場所で乾燥させる。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者:

レスメド株式会社

TEL:03-5829-4410

製造業者:

* ResMed Pty Ltd/

* レスメド ビーティーワイ リミテッド(オーストラリア)