

添付文書

2024 年 09 月作成（第 1 版）

医療機器届出番号：13B2X10322RD0011

歯科材料 08 歯科用石こう及び石こう製品

一般医療機器 歯科用樹脂系模型材(コード：34811000)

RAYDENT C&B レジン

【禁忌・禁止】

- 化学的および物理的品質が悪影響をもたらす可能性がある。
- アレルギーの徴候が現れたらすぐに医師に相談すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は黄色の色調を有する粘性の液体であり、パウチ容器に包装されて提供される。

2. 形状

粘性の液状



3. 容量

種類	RCB02BW	RCB0QBW	RCB05BW	RCB10BW
容量 (g)	200	250	500	1,000

4. 作動原理等

紫外線による光エネルギーの作用によって硬化する。

6. 原材料

- エトキシ化ビスフェノール A ジメタクリレート
- ウレタンジメタクリレート
- トリエチレングリコールジメタクリレート
- フェニルビス(2,4,6-トリメチルベンゾイル)ホスフィンオキシド
- 二酸化チタン(IV)

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用の樹脂模型を作製に用いる。

【使用方法等】

- 使用前に 5 分間浸透し、本品をよく混ぜる。
- 3D プリンタのバットに流し込む。
- バットを 3D プリンタ本体にセットする。
- 3D プリンタの取扱説明書に従い、造形を行う。
- 造形が完了したらバットから取り出し、余計な樹脂を取り除く。
- イソプロピルアルコールスプレーを噴霧し、造形物の樹脂を洗い流す。
- エアガンを使用して造形物のアルコールを取り除く。

【使用上の注意】

詳細については、取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。

1. 使用上の注意

- 本品を使用する際には医療用（歯科用）手袋（ニトリルグローブ等）を用いること。
- 目に入らないようにすること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 保管環境

25℃以下、暗所、乾燥した場所で保管すること。

2. 使用期間

容器記載の使用期限までに使用すること。

【製造販売会社及び製造業社の氏名又は名称等】

株式会社 RAY JAPAN

【製造業者】

Ray Co., Ltd.(大韓民国)

取扱説明書を必ずご参照ください。