

ニューデュラソフトPD

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本品の原材料に対して過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- ・成形品は30日を越えて使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】*

1. 概要

本品は、円板状(ラウンド/丸)の樹脂製シート材であり、軟質及び硬質の2層構造を有する。

2. 形状

以下の図のとおりである。

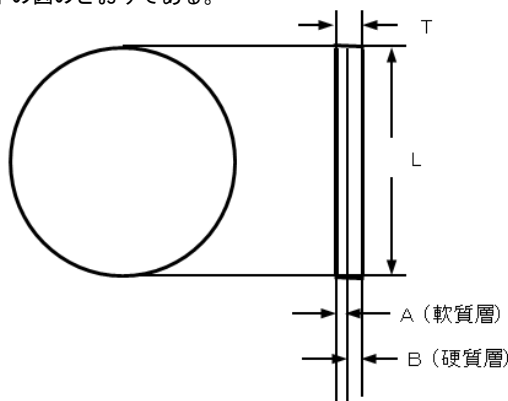

標準寸法は下記のとおり。(単位: mm)

直径 L	厚さ T(A+B)	軟質層の厚さ A	硬質層の厚さ B
125.0	1.2	0.5	0.7
	1.8	0.9	0.9
	2.5	0.9	1.6
	3.0	0.9	2.1
	4.0	0.9	3.1

3. 原材料

硬質層: ポリエチレンテレフタレート

軟質層: 熱可塑性ポリウレタン

【使用目的又は効果】

歯科用咬合スプリントを作製するために用いる。

【使用方法等】*

1. 歯科技工用成型器として、Scheu Dental 社製のバイオスター(※1)又はミニスター(※2)を使用する場合。
 - 1) 成型器の使用法・操作法に従って、直径125mmの本品を成型器にセットする。
 - 2) 石膏模型を成型器にセットする。
 - 3) セットした製品固有のCODE(※3)を入力する。又は成型器にバーコード(※3)を読み取らせ、成形条件(加熱時間と冷却時間)を設定する。
 - 4) 本品を加熱した後、加圧成形する。
 - 5) 冷却後、模型から成形品を取り外し、余剰部分をトリミングする。
 - 6) 辺縁等を仕上げ、装置が完成する。

※1 販売名「バイオスターVII」(届出番号: 13B2X00107000040)
製造販売業者: 株式会社 JM Ortho

※2 販売名「ミニスターS scan II」(届出番号 27B1X00109000325)
製造販売業者: 株式会社モリタ

※3 成形条件を示す3桁のCODEとバーコードは本品表面に印字されている。また、CODE、加熱時間、冷却時間は包装ラベルに表示されている。

2. 1. で指定した歯科技工用成型器以外を使用する場合

- 1) 使用する成型器に本品の直径が適合するのを確認し、セットする。
- 2) 石膏模型を成型器にセットする。
- 3) 成型器に使用法・操作法に従って加圧成形を行う。
- 4) 以下は1.の5)と6)と同様。

【使用上の注意】**

<重要な基本的注意>

- ・真空パックに傷や穴がある場合は使用しないこと。
- ・真空パックを開封後15分以内に使用すること。
- ・本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・万が一、製品に傷、変形等の異常がある場合には使用しないこと。
- ・成形の際は使用する成型器の取扱説明書に従うこと。(Scheu Dental 社製加圧成型器(※1、※2)の使用を推奨する。)
- ・Scheu Dental 社製加圧成型器(※1、※2)を使用する場合、成形条件はLOTごとに設定されているため、プレート又は包装に表示されたバーコード及びCODEに従うこと。
- ・プレート本体は200℃以上に加熱しないこと。
- ・3Dプリンタで作製した模型に対して使用する場合は、模型を十分に重合乾燥させてから使用すること。また、分離用シートの使用を推奨する。(推奨: イソフォランオイル/Scheu Dental 社製)
- ・本品から作製した装置を洗浄する際は、45℃未満のぬるま湯ですすぐ又はリナー洗浄剤を使用すること。
- ・成形後の装置は変形防止のため以下のような洗浄方法を選択すること。
 - 45℃以上の温水による洗浄。
 - 活性酸素、塩素などの酸化剤を含む洗浄剤による洗浄。
 - アルコール、アセトンなどの有機溶剤による洗浄。
 - スチームクリーナー、超音波洗浄器、義歯洗浄器による洗浄。
- ・変形の恐れがあるため、口腔粘膜の疼痛や炎症、特に小水疱の一時的な治療や歯肉炎の対症療法に用いられるハーブ系製品との併用はしないこと。
- ・本品を廃棄する場合には「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温多湿を避けて室温保管すること。
- ・直射日光、熱源付近又は温風に晒さないこと。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 JM Ortho
住 所: 東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F
電 話 番 号: 03-5281-4711
F A X 番 号: 03-5281-4716
製 造 業 者: Scheu Dental GmbH (ドイツ)