

ノリタケ カタナ DWX-50N

【警告】


- ・取扱説明書の操作手順は必ずお守りください。取扱方法を知らない人には触らせないでください。
- ・本機の定格（電圧、周波数）に適合するコンセントに接続してください。
- ・必ず集塵機を作動させてください。削りくずを掃除機で吸い取らないでください。
- ・圧縮空気の圧力は **1.0MPa** 以下にしてください。
- ・本機の重量は **50kg** 以上ありますので、積み降ろしや据付作業は2人以上で行ってください。また、水平で安定した場所に設置してください。
- ・燃えやすいもののそば、ガスの充満する場所に設置しないでください。
- ・電源プラグにすぐ手が届くようにしておいてください。緊急時にすばやく電源プラグを抜けるようにしてください。
- ・火花、煙、こげた臭い、異音、異常な動作が発生したら、すぐに電源プラグを抜いてください。

【禁忌・禁止】

- ・作業場所に火気を持ち込まないでください。切削くずに引火する恐れがあります。
- ・分解、修理、改造はしないでください。火災、感電、けがの原因になります。修理が必要になった場合は、販売店又は本書末尾記載のお問い合わせ先にご連絡ください。
- ・屋外、水のかかる場所、湿気の多い場所には設置しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

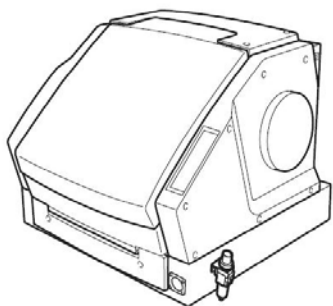

2. 寸法・質量

幅×奥行×高さ：656×656×557mm
質量：約50kg

3. 電気規格

AC100～240V, 50/60Hz
消費電力：約275W

4. 動作原理

メインスピンドルに回転運動を与え、Z、X、Y軸及びA、B軸方向のCNC制御により、材料と軸状ツールを接触させて切削加工を行う。

【使用目的、効能又は効果】

1. 使用目的

CAD/CAM技術を利用して、歯科技工士及び歯科医師が行う歯科用補綴物の作製を支援する。

2. 効果

歯科用補綴物を迅速、かつ、高精度に作製する。

3. 一般的名称の定義

複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計（CAD）又はコンピュータ支援製造（CAM）に用いるものをいう。

**【品目仕様等】

**加工可能な材料：歯科切削加工用セラミックス、歯科切削加工用レジン材料、歯科用キャストイングワックス

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用環境条件

使用場所：室内
温度：5～40℃
湿度：35～80%（結露のないこと）

2. 操作方法

- (1)電源を投入する
- (2)ワークの取り付け
- (3)ツールの取り付け
- (4)コンピュータから加工データの送信
- (5)加工開始

詳細な操作方法は取扱説明書をご参照ください。

【使用上の注意】

使用方法

- (1)歯科医療従事者以外には使用しないこと
- (2)本機器を患者環境内で使用しないこと。
- (3)【使用目的】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (4)精密機器のため、取扱には十分注意すること。
- (5)機器を分解、修理、改造しないこと。
- (6)異常発生又は故障したときは、直ちに担当者（当社又は当社指定の業者）に連絡すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

- (1)水のかからない場所に保管する。
- (2)傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意して保管する。
- (3)化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない。
- (4)歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

有効期間・使用の期限（耐用期間）

適正な保守点検及び修理が行われた場合に限り5年間とする（自己認証）。

ただし、耐用期間は使用条件、使用環境により差異を生ずることがあります。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【保守・点検に係る事項】

1. 日常的な保守・点検

使用後の清掃

2. 定期的な保守・点検

定期的な補正と清掃

詳細は取扱説明書をご参照ください。

【包装】

ノリタケ カタナ DWX-50N 一式／1箱

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称 及び住所等】

製造販売元：ローランドディー．ジー．株式会社

住所：静岡県浜松市北区新都田1-1-3

**電話番号：（053）484-1224

製造元：ローランドディー．ジー．株式会社

住所：静岡県浜松市北区新都田1-6-4

*販売元：クラレノリタケデンタル株式会社

住所：愛知県みよし市三好町東山300番地

*【お問い合わせ先】

* クラレノリタケデンタル株式会社

カタナインフォメーションダイヤル

フリーダイヤル：（0120）936-426

受付時間：9:30～17:30（月～金）

* Website：http://www.kuraraynoritake.jp/