

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 35761000

歯科技工用重合装置 LC-3DPrint Box

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造



2. 寸法・重量

幅×奥行×高さ：41×44×38cm

質量：約22kg

3. 電気規格

AC115V, 50/60Hz

消費電力：約372W

4. 動作原理

チャンバー内部に取り付けられたランプの光により高分子材料の重合を行う。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

歯科技工室で、高分子材料を光重合するために用いる。

2. 一般的名称の定義

歯科技工室で、高分子材料を重合するために用いる装置をいう。加熱、加熱と加圧、光、またはこれらを組み合わせて重合を行う。

【使用方法等】

1. 使用環境条件

使用場所：室内

温度：20～30℃

湿度：35～80%（結露のないこと）

2. 操作方法

- (1) 電源を入れる。
 - (2) チャンバーに重合する造形物を設置する。
 - (3) 重合対象物に適切な重合時間を設定する。
 - (4) スタートボタンを押して光重合を開始する。
 - (5) 終了後、チャンバーから造形物を取り出す。
- 詳細な操作方法是各機械の取扱説明書をご参照ください。

【使用上の注意】

その他の注意

- (1) ランプを直視しないこと。
- (2) ランプは劣化するので、ランプの定格寿命前に交換することを推奨する。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- (1) 水のかからない場所に保管する。
- (2) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない。
- (3) 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

耐用期間・使用期間

適正な保守点検及び修理が行われた場合に限り5年間とする（自己認証）。

ただし、耐用期間は使用条件、使用環境により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

1. 日常的な保守・点検

使用後の清掃

2. 定期的な保守・点検

定期的なランプ交換と清掃

詳細は取扱説明書をご参照ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〔製造販売業者及び製造業者〕

ローランド ディー・ジー・株式会社

住所：静岡県浜松市北区新都田1-1-3

電話番号：(053) 484-1224

〔お問い合わせ先〕

ローランド ディー・ジー・株式会社

リペアセンター

TEL：(053) 428-3161

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:45

（ただし土、日、祝日及び指定休業日を除く）

FAX での問い合わせ先

FAX：(053) 428-3163

〔外国製造所の国名と製造業者の名称〕

オランダ、Vertex-Dental B.V.

R1-17220

取扱説明書を必ずご参照ください

