

機械器具 36 医療用ピンセット
一般医療機器 歯科治療用ピンセット 31814000

生田式ピンセット

【禁忌・禁止】

1. 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
2. 使用目的以外には使用しないこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
4. 器具の形態変更や改造等はないこと。
5. 器具を落下させないこと。又、強い衝撃を与えないこと。

【形状・構造及び原理等】

【写真】



【原理】

先端部を閉じることによって物体を把持する。

【使用目的又は効果】

本品は、2つの先細のバネ性先端部をもつ歯科手術器具であり、その先端部を近接させて（閉じて）、口腔内に適用する創傷被覆・保護材・その他を把持する。

【使用方法等】

親指と人差し指等を用いて握ると2つの先端は閉じる。
開くときには握る力を弱める。

【使用上の注意】

【禁忌・禁止】

1. 破損等の原因となるため、曲げ、切削、打刻等の二次加工は絶対行わないこと。
2. 本品のヒートテイングは行わないこと。

【使用注意】

1. 本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【重要な基本的注意】

1. 本品及び破断片等の誤飲を防止するための処置を取った上で使用すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。又、使用前点検を行うこと。
3. 無理な角度、過度の加圧での使用は折れたり、曲がったりすることがあるので避けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

1. 電気分解を要因とした錆を防ぐため、材質の異なる器具と一緒に保管しないこと。
2. 「もらいさび」を防ぐために下記のことにご注意すること。
(ア) 錆びている器具と一緒に保管しないこと。
(イ) 化学薬品と一緒に保管しないこと。
(ウ) 消毒器・滅菌器、保管庫等の内部に発生した錆や汚れにご注意すること。
3. 本品は歯科医療従事者が適切に保管・管理すること。
4. 本品を保管する場所は、高温・多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

【洗浄・消毒・滅菌】

1. 洗浄装置（超音波洗浄器等）で器具の洗浄を行う際は、器具と器具が接触しないようにすること。
2. 使用後は、付着した血液・体液・組織片・薬品等を直ちに洗浄し、消毒すること。
3. 下記の洗浄・消毒・滅菌方法は金属を腐食させる恐れがあるため行わない。
(ア) 家庭用洗剤による洗浄
(イ) 超酸化水（超酸性水）の使用
(ウ) 化学性ガスを用いたオートクレーブ滅菌
(エ) 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン他金属材料に影響が見られる薬剤の使用
4. 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた用法・用量を守ること。薬剤の種類によっては金属材料に影響を及ぼすことがある。
5. 洗浄・消毒・滅菌後は直ちに水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。
6. 磨き粉や金属ウール、金ブラシは器具の表面を損傷し腐食等の原因となるため使用を避けること。

【点検】

使用前、使用後に先端部や曲げ部、柄部に破損や汚れ、腐食等がないか確認すること。

また、これらがある場合は使用を中止すること。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

和田精密歯研株式会社
大阪府大阪市東淀川区西淡路 3-15-46
06-6321-8551