

歯科材料 09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ(JMDN コード：35768000)

ネオバイオテック NeoBRUSH

【禁忌・禁止】

- ・記載の使用目的以外に使用しないこと。
- ・規定された回転数以上で使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. i - Brush

1) 形状



2) ブラシ：ステンレス鋼

シャंक：ポリスルホン

3) 推奨回転速度：2,000～5,000rpm

2. i - Brush 2

1) 形状



2) 原材料

チップ：Ni-Ti 合金

シャंक：ポリスルホン

3) 推奨回転速度：2,000～5,000rpm

3. T - Brush

1) 形状




2) 原材料

3) チップ：チタン

4) 推奨回転速度：20,000rpm

4. R - Brush

1) 形状

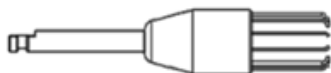

2) 原材料

チップ：Ni-Ti 合金

シャंक：ポリスルホン

キャップ：スチレンブタジエンゴム

3) 推奨回転速度：2,000～5,000rpm

【使用目的又は効果】

本品は、歯科衛生士及び歯科医師、又はそのどちらかが、歯科用インプラントを含む歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具である。
同一口腔内であれば再使用可能。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- 1) 本品を滅菌包装から取り出す。
- 2) 使用前に本品の外観に異常が無いかを確認する。

2. 使用中の操作

- 1) 回転式の歯科用器具に本品のシャंकを連結する。
- 2) 回転式の歯科用器具を操作し、本品を回転させ、歯科用インプラントを含む歯の清掃・研磨を行う。
- 3) 清掃・研磨が終了したら、回転式の歯科用器具から本品を取り外す。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 歯科医療従事者以外使用しないこと。
2. T - Brush 以外はオートクレーブ等の加熱滅菌は行わないこと。
3. 使用前に本品の破損の有無を確認し、破損があった場合は使用をしないこと。
4. 使用中に患者に異常が認められた時は、直ちに使用を中止し適切な処置を行うこと。
5. 回転式の歯科用器具への装着を確実にしてから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品は、高温、多湿を避けて、保管すること。
2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：和田精密歯研株式会社

大阪府大阪市東淀川区西淡路 3-15-46
06-6321-8551

製造業者：Neobiotech Co., Ltd. (韓国)