

2023 年 4 月（第四版）※※

2021 年 10 月（第三版）※

2021 年 9 月（第二版）

医療機器届出番号：27B1X00122000047

歯 0 9 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ 3 5 7 6 8 0 0 0

（器 4 8 注射筒 一般医療機器 汎用注射筒 1 3 9 2 9 0 0 1）

再使用禁止

ジンジスター

【禁忌・禁止】

・記載の使用目的以外に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造※

① GingiStar



GingiStar ヘッドパーツ



② GingiStar チップ 2S



③ GingiStar チップ 3S



・シリンジチューブ(GingiStar チップ 2S, 3S 共通)



④ GingiStar シリンジ



⑤ 充電器



2. 口腔内に接触する原材料※

GingiStar ヘッドパーツ：ポリスルホン

GingiStar チップ 2S, 3S：ナイロン, ステンレス, ポリプロピレン

【使用目的又は効果】※

本品は歯科衛生士及び歯科医師、又はそのどちらかが歯（人工歯根・連結部分・上部構造を含む）の清掃に用いる事を目的としたブラシ及びプラスチック製の目盛付の容器及びプランジャーを備えた歯科用器具である。

【使用方法等】

【使用前の注意事項】

- GingiStar を十分に（3.5 時間以上を推奨）充電してください。
- 本体とヘッドを分離して、洗浄及び消毒又は滅菌を行った後に使用してください。

- シリンジにシリンジチューブを取り付け、GingiStar シリンジを組み立てます。
- 本体の PumpMotor ボタンを押し、GingiStar シリンジを取り付けるスペースを確保します。
- 本体に GingiStar シリンジ、GingiStar チップの順番で取り付けます。
- プランジャーを引き、GingiStar シリンジ内に洗浄用の水を充填します。

【使用方法】

- On/Off ボタンを押すと GingiStar チップが振動を始め、GingiStar シリンジのプランジャーを断続的に押し出し、洗浄用の水が GingiStar チップの先端より出ます。（On/Off スイッチを押すごとに [強→弱→Off] と動作が変化します。）
- 正しく動作している事を確認し、歯の清掃を行います。
- 使用後は組立の逆の手順で分解し、ヘッドを洗浄及び消毒又は滅菌してください。

【滅菌方法】

適用：GingiStar ヘッドパーツ

滅菌の種類：オートクレーブ滅菌

時間と温度：135℃/10 分以上（真空脱気プレバキューム式）

【使用上の注意】

- 一度使用したGingiStar シリンジとGingiStar チップは再使用しないでください。
- 改造を行わないでください。
- 充電をする際は、専用の充電器を使用してください。
- 電池が膨れていたり、液漏れが確認された場合は直ちに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。
- 異常な発熱等が確認された場合、直ちに使用を中止してください。
- 本来の用途以外に使用する事はおやめください。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】※※

製造販売業者：和田精密歯研株式会社

大阪府大阪市東淀川区西淡路 3-15-46

06-6321-8551

製造業者：DMS CO., LTD.

ディー・エム・エス コーポレーション リミテッド（韓国）

【取扱説明書を必ずご参照ください。】