

2024年9月(第二版)\*  
2023年6月(初版)


医療機器届出番号:27B1X00122000053

機械器具 60 歯科用エンジン  
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 34713000

## ZRapid iSLM160 デンタル

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

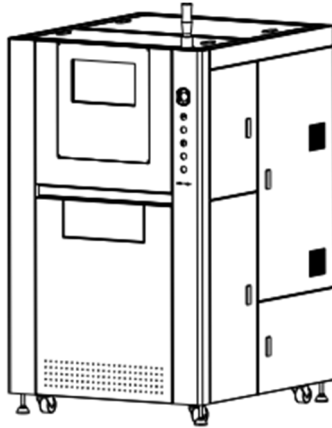

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売業者 : 和田精密歯研株式会社  
住 所 : 大阪府大阪市東淀川区西淡路 3-15-46  
電 話 番 号 : 06-6321-8551  
製 造 業 者 : ZRapid Technologies Co., Ltd  
(中華人民共和国)

#### 2. 寸法・重量

幅×奥行×高さ:1100mm×1280mm×1850mm  
重量 : 850kg

#### 3. 電気規格

単相 AC220V-240V, 50/60Hz, 13.6A

### 【使用目的又は効果】

技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援製造(CAM)に用いること。

### 【使用方法等】\*

#### 1. 使用環境条件

使用場所:室内  
温度:20~26℃  
湿度:40%未満

#### 2. 操作方法

- 造形レンズを清掃し、ガスを充填する。
- 造形プレートを設置する。
- 金属パウダーを投入する。
- 造形用データを取り込む。
- 造形をスタートさせる。
- 造形プレートを取り出す。

### 【使用上の注意】

- ・使用目的又は効果に記載の用途以外は使用しないでください。
- ・本機を患者環境内で使用しないでください。
- ・本機の重量に耐えうる場所に設置してください。
- ・精密機器のため、取り扱いには十分注意してください。
- ・機器を分解、修理、改造しないでください。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

- ・屋内に保管すること。
- ・傾斜・振動・衝撃など安定状態に注意して保管すること。
- ・化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所には保管しないこと。
- ・歯科医療従業者以外が触れないよう、適切に管理をすること。

【取扱説明書を必ずご参照ください。】