

機械器具 36 医療用ピンセット

一般医療機器

ピンセット

JMDN 35079001

鋭 匙 ピン セ ッ ト

【 警 告 】

クロイツフェルト・ヤコブ病 (CJD) の患者、又はその疑いのある患者に使用した器具を再使用する場合には、最新の国内規制、ガイドラインを遵守すること。[二次感染の恐れがあります]

【 禁 忌 ・ 禁 止 】

- (1) 目的外使用の禁止
 - ・手術、診療の目的以外で使用しないで下さい。
 - ・先の細い物、長い形状の物は、無理な角度、過度の加圧での使用は避けて下さい。破折する恐れがあります。
- (2) 二次加工禁止 [折損等の原因]
 - ・本品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の改造はしないで下さい。
- (3) 磨き粉、金属ウール・金ブラシの使用禁止 [錆や腐食の原因]
 - ・腐食(錆び)の原因となるので洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないで下さい。
- (4) 家庭用洗剤の使用禁止 [錆や腐食の原因]
 - ・家庭用洗剤は、金属を腐食することがあるので使用しないで下さい。
- (5) 化学薬品の使用禁止 [錆や腐食の原因]
 - ・本品を化学薬品にさらすことは避けて下さい。
- (6) 接触凝固での使用禁止 [感電、火傷の原因]
 - ・接触凝固等、電気メス先を本品に直接接触させて使用することは絶対にしないで下さい。
- (7) 加熱不飽和ガス滅菌器による滅菌禁止
 - ・金属を腐食させるので化学性ガスを用いたオートクレーブ滅菌器を使用しないで下さい。

*【 形状・構造及び原理等 】

本品は、症例・術式・使用部位等により、多種の形状・サイズがあり異なる販売名の品種が存在しますが、基本的な形状は以下になります。



このロゴマークのピンセット全てに該当する添付文書となっております。



- (1) 組成
 - ・ステンレス鋼（鉄と比較して錆びにくい金属ですが、使用方法、環境によっては腐食することがあります。）
- (2) 動作原理
 - ・弾力性のある2枚の金属板を溶接し手指で操作し先端で物体を挟む。

【 使用目的、又は効果 】

治療等の医療を目的とする。

*【 使用方法等 】

本品のご使用前には必ず変形や傷、ひび等ないか、器具が正常に作動することを確認し必ず洗浄・滅菌して使用して下さい。

*【 使用上の注意 】

- (1) 重要な基本的注意
 - ・本品は未滅菌のため、使用に際しては必ず洗浄し、適切に機能する事が確認された標準的滅菌条件又は医療機関により確認され有効性が立証

された滅菌条件で滅菌を行い、使用して下さい。

- ・本品が高リスク手技に使用された場合には、プリオン病感染症予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施して下さい。
 - ・本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には製造販売業者又は貸与業者に連絡して下さい。
尚、プリオン不活化の為の洗浄、滅菌の条件については最新のプリオン病感染症予防ガイドラインを参照して下さい。
- (2) 洗浄、消毒、滅菌上の注意
 - ・血液、体液、組織片等により汚染した器具は使用後直ちに洗浄、消毒、滅菌を行って下さい。汚染物質を付着したままにしておくことと除去しにくくなるだけでなく汚れが残った状態で滅菌、消毒を行うと錆等が生ずる原因となります。
 - ・洗浄、消毒、滅菌には防錆洗浄液、精製水、蒸留水、脱イオン水を使用して下さい。水道水や超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させる事があるので、使用しないで下さい。
 - ・洗浄装置(超音波洗浄器等)で刃物の洗浄を行う際は刃物に他の器具が接触しないようにして下さい。
 - ・薬液消毒を行う時は薬剤の添付文書に書かれた用法・用量を守って下さい。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあります。
 - ・次の薬剤は金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないで下さい。
(次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン)
 - ・加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器など)の乾燥温度に注意して下さい。高温の乾燥は器具が変質または変色する事があります。
 - ・洗浄、消毒、滅菌の器具は水分を除去し必ず乾燥させてから保管して下さい。水分が付着したまま長時間放置すると結合部に進入した水分により腐食し、結合部が剥がれる恐れがあります。
 - ・プラズマ滅菌は素材に影響を及ぼすので使用しないで下さい。
 - (3) 取扱いの注意
 - ・本品を落下、変形あるいはキズをつける等の粗雑な取扱いはしないで下さい。[器具器械の寿命を著しく低下させます]

【 保 管 方 法 】

- ・常温、常湿で清潔な場所に保管してください。
- ・電気分解を要因とした錆を防ぐため材質の異なる器具と一緒に保管しないで下さい。
- ・「もらいさび」を防ぐために下記の事に注意して下さい。
 - ①錆びている器具と一緒に保管しないで下さい。
 - ②化学薬品と一緒に保管しないで下さい。
 - ③消毒器・滅菌器、保管庫等の内部に発生した錆びや汚れに注意して下さい。
- ・本品は医療従事者が適切に保管・管理して下さい。

**【 包 装 】

1本(丁)

【 製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等 】

合資会社 渡辺医科器械製作所
東京都江戸川区北小岩3-20-14
TEL 03-3673-4741
FAX 03-3673-4742
info@watanabe-ika.com