

## 販売名: LSP 蘇生マスク

成人用・小児用  
一般医療機器

### 【警告】


- ・接続する人工呼吸器(蘇生器)は、正常に作動することを必ず確認すること。
- ・接続された人工呼吸器(蘇生器)が正常に作動しない場合は、他の適切な方法で呼吸管理を実施すること。
- ・人工呼吸器(蘇生器)が正常に作動していることを、患者の胸部の動きにより目視・確認すること。
- ・本品はシリコンを使用した製品のため、稀にシリコンアレルギーの患者がいることを十分留意し、アレルギー反応が確認された場合は、本品の使用を直ちに中止し、適切な方法で処置を行うこと。

### 【禁忌・禁止】

- ・使用する人工呼吸器(蘇生器等)の禁忌・禁止事項に順ずる。

### 【形状・構造及び原理等】※

<外観>

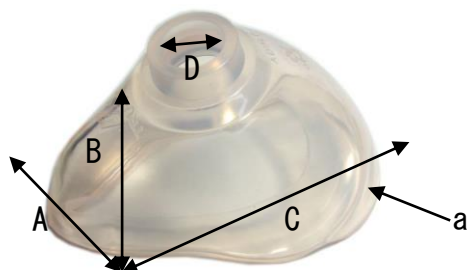

<寸法等>

- 成人用: A93×B77×C132/D22 (mm/±3%)  
重量: 約 100g (±3%)
- 小児用: A77×B67×C117/D22 (mm/±3%)  
重量: 約 60g (±3%)

<作動原理>

マスクを顔(口・鼻部)に密着させ、人工呼吸器(蘇生器)を作動させることにより、呼吸器・呼吸回路・マスクを経由し、ガスが患者に投与される。呼気は、マスクを経由し機器の排気口より排出される。  
下記(a)部が顎に掛かるように設計されているため、気道確保が容易に行える。

<体に接触する部分の原材料>

シリコン

<使用温度範囲>

-18~60℃

### 【使用目的又は効果】※

人工呼吸器(蘇生器)の呼吸回路に接続し、患者の鼻・口をおおい、患者に人工呼吸器からのガスを供給するためのマスク。

### 【使用方法等】※

【使用前準備】

1. 患者の体位(気道確保等)を人工呼吸器(蘇生器)の使用する適切な状態にする。
2. 本器の状態が正常(変形・亀裂の有無等)であることを確認する。
3. 患者の体格に合致したサイズを選択する。
4. 患者の顔(口・鼻部)に適切な位置に密着させる。

【使用中の操作】

1. 人工呼吸器(蘇生器)の作動時において、患者の胸部の動きを確認し、適切な人工呼吸が行われていることを確認する。
2. 使用中に患者から吐物等が発生した場合は、適切に処理すること。

### 【使用後の操作】

1. 人工呼吸器(蘇生器)より取外します。
2. 次回の使用に支障が無いように洗浄(消毒・滅菌)を行い、洗浄後は完全に乾燥させること。
3. 保管前に本器の破損・劣化・変色の有無を確認し、次回の使用に支障があると判断した場合は、適切な処置(交換・購入)を行うこと。
4. 保管は、使用する人工呼吸器(蘇生器)と同じ場所(収納ケース等)に収納し、次回の使用に支障が無いようにすること。この時、変形に特に注意すること。
5. 保管場所は、人工呼吸器(蘇生器)に従うこと。

### 【保管方法及び有効期間等】※

保管温度範囲: -40~50℃

使用期限: 経年劣化による変色・傷・ワレ及び呼吸器回路との接続不良等、本器の機能が維持できないと判断された場合。

### 【保守・点検に係る事項】※

<消毒・滅菌性能>

	方法	滅菌・消毒条件		処理後
		温度・濃度等	時間	
滅菌	高圧蒸気滅菌 (オートクレーブ)	132~137℃	15分	冷却後乾燥
消毒	オソソフタル アルデヒド	室温 0.55%	60分	30~40℃の ぬるま湯で 2分間すすぎ 乾燥
	次亜塩素酸 ナトリウム	室温 0.5%	20分	
	低温殺菌 (パストール法)	70~75℃	30分	乾燥

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】※

「製造販売業者の名称」

 株式会社 **ワコー商事**  
WAKO SHOJI CO., LTD.

〒251-0871 神奈川県藤沢市善行 7-3-5  
TEL.0466-84-2485/FAX.0466-84-2484  
e-mail info@wako-shoji.com  
URL http://www.wako-shoji.com/

「製造業者の名称」

製造先国名: アメリカ  
製造会社名: Allied Healthcare Products, Inc.  
アライドヘルスケアプロダクツインク社