

医療用品 O4 整形用品  
 一般的名称: 医療ガーゼ (JMDNコード: 13700000)  
**エマージェンシーバンデージ**  
 一般医療機器

**再使用禁止**

**【警告】**

・本器のパッケージが破損した又は開封した状態で保管した物を使用しないで下さい。(滅菌状態が保持出来ず、感染のリスクがあるため)

**【禁忌・禁止】**

・本器の使用は、救急処置の訓練を受けた者による使用を前提としています。  
 ・血液感染の可能性があるため本品の再使用は行わないで下さい。

**【形状・構造及び原理等】**

<外觀及びバリエーションのサイズと形状>

エマージェンシーバンデージミリタリーFCPO1

エマージェンシーバンデージミリタリーFCPO2

展開前(表面)

展開時の形状



エマージェンシーバンデージシビリアン FCPO3

エマージェンシーバンデージシビリアン FCPO6

展開前(表面)

展開時の形状



エマージェンシーバンデージミリタリーFCPO9

展開前(表面)

展開時の形状



エマージェンシーバンデージミリタリーFCPO9T

展開前(表面)

展開時の形状



エマージェンシーバンデージシビリアン FCP10T

展開前(表面)

展開時の形状



エマージェンシーバンデージミリタリーFCPT3

展開前(表面)

展開時の形状



略式名称	包帯(cm)	パッド(cm)	保護シート(cm)
FCPO1	370x10	10x18	-
FCPO3	370x10	10x18	-
FCPO2	370x15	15x18	-
FCPO6	370x15	15x18	-
FCPO9	500x20	30x30	-
FCPO9T	500x20	30x30	40x40
FCP10T	500x20	30x30	40x40
FCPT3	370x10	10x18	-

<包装時の形状>



<原理>


本品のパッド部分で出血面(部位)を覆うことにより、血液を吸収、創傷部の保護をする。また、包帯を巻きつけることで創傷部を圧迫し、出血の抑制、包帯での固定が出来る。バリエーションとして、内部器官の乾燥や汚染を防止するための保護シートがパッドに付属しているものがある。

<構造>

FCPO1・FCPO2・FCPO3・FCPO6

立体図

組立時の形状

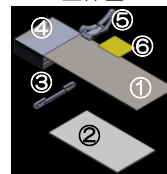

平面図




FCPT3

立体図

パッド(展開前)

パッド(展開時)

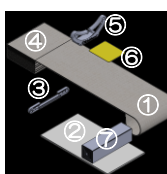



平面図



FCPO9

立体図



平面図

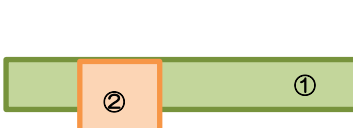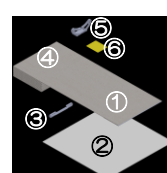

FCPO9T・FCP10T

立体図

平面図

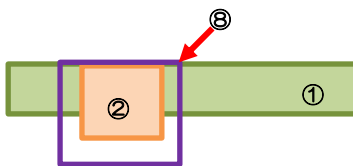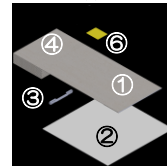

<各部名称と原材料>

番号	名称	原材料
①	包帯	コットン、ポリアミド、ポリウレタン
②	パッド	フラップパルプ
③	クロージャーバー	ポリカーボネート
④	ストップ&ゴー機構	コットン
⑤	プレッシャーバー	ポリアミド
⑥	パッドラベル	ポリエチレンテレフタレート
⑦	ガーゼ	コットン、ポリアミド、ポリウレタン
⑧	保護シート	ポリアミド、ポリエチレン

**【使用目的又は効果】**

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。


## 【使用方法等】

### ＜使用前注意＞

1. 本器は滅菌済みの商品です。但し、パッケージが未破損、未開封が条件です。滅菌状態が保たれていない場合、感染のリスクがあります。
2. 救急処置の訓練を受けた者による使用を前提としています。

### ＜使用方法＞


#### ＜FCPO1、FCPO2、FCPO3、FCPO6＞

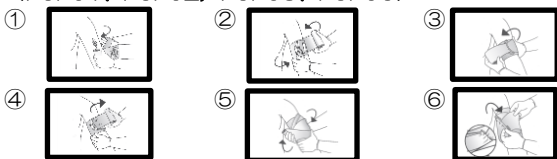

1. 創傷部にパッドを置き、包帯を巻きます。①、②
2. 包帯をプレッシャーバーに挿入し、反対方向に引き戻して締め上げます。③、④
3. 畳まれた包帯を引っ張りながら展開し巻き上げて下さい。⑤
4. クロージャーバーを包帯に引っ掛けることで固定出来ます。⑥
5. 本器を取り外す際は包帯からクロージャーバーを外し、ゆっくと緩めてください。


#### ＜FCPO9＞

##### (腹部・幅広い創傷に適用する場合)

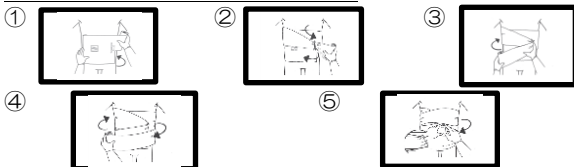

1. 必要に応じてパッドに生理食塩水を適量含ませます。
2. 傷口にパッドを置き、包帯を展開しながら創傷部の周囲に巻き付けていきます。このときつく締めあげないよう注意してください。①
3. 包帯をパッドの上部を覆うようにして巻き、プレッシャーバーに挿入し、巻き上げる方向を反対側に変え、パッド下部からパッド全体を覆うように巻いていきます。②、③、④。  
(パッドの四方が端までしっかりと覆われるようにしてください。)
4. 包帯を巻き終えたら、クロージャーバーを包帯に引っ掛け固定します。⑤
5. 本器を取り外す際は包帯からクロージャーバーを外し、ゆっくと緩めてください。

##### (切断面に適用する場合)

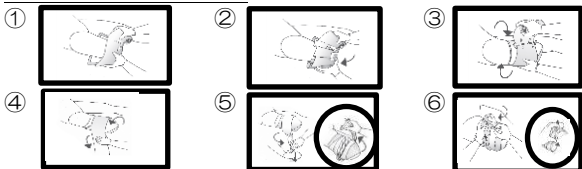

1. 切断面の中心にパッドをあてがいます。①
2. 切断面をパッドで包み込みます。②
3. プレッシャーバーに包帯を挿入し、パッドの端を全て覆うように包帯を巻き上げて下さい。③
4. 包帯を2～3周分残し、残った部分の包帯を捻って紐状にし、パッドの端を固定するように巻きつけていきます。④、⑤
5. 巻付けた紐状の間にクロージャーバーを挿入し、回転させることで圧迫することが出来ます。⑥
6. 本器を取り外す際は包帯からクロージャーバーを外し、ゆっくと緩めてください。

#### ＜FCPO9T、FCP10T＞

##### (腹部・幅広い創傷に適用する場合)




1. 保護シートが不要な場合は取除いてください。
2. 必要に応じてパッドに生理食塩水を適量含ませます。
3. 傷口にパッドを置き、包帯を展開しながら創傷部の周囲に巻付けていきます。このときつく締めあげないよう注意してください。①
4. パッドの端をすべて覆うようにして巻いていきます。
5. クロージャーバーを包帯に引っ掛け固定してください。②
6. 本器を取り外す際は包帯からクロージャーバーを外し、ゆっくと緩めてください。

##### (切断面に適用する場合)



1. 保護シートが不要な場合は取除いてください。
2. 切断面の中心にパッドをあてがいます。①
3. パッドの端を覆うように包帯を巻き上げていきます。
4. 包帯を2～3周分残し、残った部分の包帯を捻って紐状にし、パッドの端を固定するように巻きつけていきます。②
5. 巻付けた紐状の間にクロージャーバーを挿入し、回転させることで圧迫することが出来ます。③
6. クロージャーバーのフックを包帯に引っ掛けて固定します。
7. 本器を取り外す際は包帯からクロージャーバーを外し、ゆっくと緩めてください。

#### ＜FCPT3＞

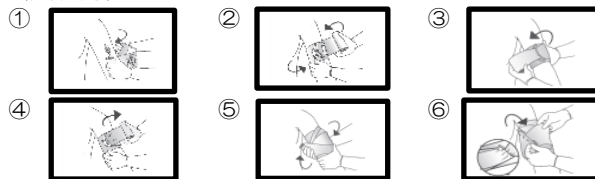


1. 創傷部にパッドを置き包帯を巻きます。①、②
2. 包帯をプレッシャーバーに挿入し、反対方向に引き戻して締め上げます。③、④
3. 畳まれた包帯を引っ張りながら展開し巻き上げて下さい。⑤
4. クロージャーバーを包帯に引っ掛けることで固定出来ます。⑥
5. 本器を取り外す際は包帯からクロージャーバーを外し、ゆっくと緩めてください。

### その他の使い方

#### (腹部・幅広い創傷に適用する場合)

折りたたまれたパッドを広げます。⑦その後手順1～5に従って本器を適用してください。

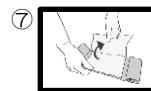

#### (貫通射創に適用する場合)

本バリエーションのパッドは2分割にすることが可能です。⑧パッドを分割して、射入口、射出口それぞれの傷に適用します。その後手順1～5に従って本器を適用して下さい。



#### (予備ガーゼについて)

包帯の端にある袖からガーゼを取出し、必要に応じて使用できます。⑨



### 【使用上の注意】

1. 使用前に本品が使用期限内であることを確認して下さい。
2. パッケージに使用期限表示がないもの、使用期限後のものは使用しないで下さい。
3. 包装が開封、破損している場合は使用しないで下さい。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### ＜保管方法＞

- 水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて清潔な場所で保管する。
- 火気の恐れのない場所で保管すること。(常温・常湿)

#### ＜使用期限＞

- パッケージに記載

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

「製造販売業者の名称及び住所」



〒251-0871 神奈川県藤沢市善行 7-3-5  
TEL.0466-84-2485/FAX.0466-84-2484  
e-mail info@wako-shoji.com  
URL http://www.wako-shoji.com/

「製造業者の名称及び国名」

製造会社名：First Care Products Ltd.  
製造元国名：イスラエル