

単回使用

バーンテック

【警告】

適応対象

1. 熱傷患部の大きさに合わせた製品を使用すること。
2. 処置時には、要救護者のABC(呼吸と循環)を確保すること。
3. 本器の使用目的以外の使用を厳禁とする。

【禁忌・禁止】

1. 本器の使用は、医師及び医師の指示を受けた看護師及び救急救命士又は熱傷処置に専門的な知識を持ち本器の使用方法を熟知した者に限る。
2. 本器の装着は、熱傷患者の状態を確認しながら、二次的災害等の発生しない場所で行うこと。
3. 使用前後には、適切に廃棄すること。

【形状・構造及び原理等】

＜外観＞



バーンテックのドレッシング部




バーンテックマスクのドレッシング部


＜バリエーションのサイズと形状＞

名称	サイズ (cm)
バーンテック 5x5*	5x5
バーンテック 6x12*	6x12
バーンテック 10x10	10x10
バーンテック 12x12*	12x12
バーンテック 12x24*	12x24
バーンテック 10x40	10x40
バーンテック 20x20	20x20
バーンテック 22x28*	22x28
バーンテック 20x40	20x40
バーンテック 40x60*	40x60
バーンテックフェイスマスク 25x25*	25x25
バーンテックフェイスマスク 30x40	30x40
バーンテックフェイスマスク 40x60*	40x60

※未輸入のサイズ: 詳細はお問い合わせ下さい。

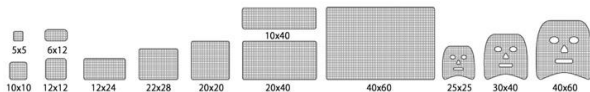

＜構造・原材料＞

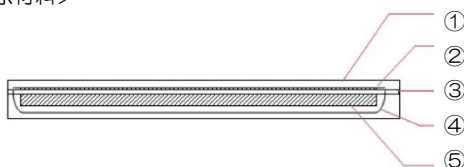

	名称	原材料
①	密封包装	ポリエチレンテレフタレート/ ポリエチレン
②	保護フィルム	ポリエチレンテレフタレート
③	不織布	ビスコース/ポリエステル
④	プラスチック保護ケース	プラスチック
⑤	ハイドロゲルシート	ポリビニルピロリドン/ポリエチレングリコール/寒天/純水

【使用目的、効能又は効果】

皮膚の傷口を保護や火傷の包帯剤として使用する。

【使用方法】

1. 熱傷患部の大きさにより、適切なサイズを選択します。
2. 外装滅菌包装から密封包装を取り出します。
3. 密封包装より本器を取り出します。
4. 不織布を摘み、ドレッシング部をプラスチック保護ケースから取出し、熱傷患部を覆うように被せます。
5. 保護フィルムを剥がし、熱傷部位を覆います。
6. 適切な包帯等を使用し、患部と本器を密着させます。
7. 必要に応じて、医療機関への通報を行います。
8. 医師等の指示に従い、原則最大 12 時間を目標とし本器を交換するか、他の適切な処置を行います。



【使用上の注意】

1. 使用前に本品が使用期限内であることを確認して下さい。
2. 包装に使用期限表示のないもの、使用期限後のものは使用しないで下さい。
3. 包装が開封、破損している場合は使用しないで下さい。
4. 本品は開封後直ちに使用して下さい。
5. 化学物質による熱傷には、本品を使用前に該当の化学物質を予め除去しておくことが望ましい。
6. 水反応性化学物質には適用しないこと。
7. 通電している電気機器に接触している傷病者には使用しないこと。
8. 使用後は医療廃棄物として廃棄して下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

- ・水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて清潔な場所で保管する。(常温・常湿)
- ・火気の恐れのない場所で保管すること。

＜使用期限＞

- ・外装に記載(滅菌後 5 年間)

【包装】

各型式について 1 式単位で梱包

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

「製造販売業者の名称及び住所」



〒251-0871 神奈川県藤沢市善行 7-3-5
TEL 0466-84-2485/FAX 0466-84-2484
e-mail info@wako-shoji.com

URL <http://www.wako-shoji.com/>

「製造業者の名称及び国名」

KIKGEL (ポーランド)

本書は、取扱説明書を兼ねています。必ずお読み頂き大切に保管して下さい。