

## 販売名：メッド

一般医療機器

### 【警告】

- 1.本器を装着する際には、頸椎固定具を併用すること。
- 2.装着及び傷病者の移動救出に際しては、二人以上で行うこと。
- 3.装着時には、傷病者の身体から鋭利な物、固いものは取り外すこと。
- 4.装着後、傷病者の状態を確認しながら移動（搬送）を行うが、状態に問題があると判断する場合には、ストレッチャー等で行うこと。
- 5.搬送時の傷病者の急変を考慮し、蘇生器等呼吸管理及び AED 等の準備を可能な限り行うこと。

### 【禁忌・禁止】\*

- 1.妊婦の場合は、腹部の圧迫に充分注意すること。
- 2.小児の場合で、固定しても隙間がある場合は、毛布等を使用して隙間の無いようにすること。

### 【形状・構造及び原理等】\*

#### 1.構成

- ①メッド本体（固定ベルト付）
- ②板状枕
- ③額・顎固定ベルト（各1本）
- ④収納袋



#### 2.本体のサイズ、重量、材質

サイズ：(a)500×(b)820×(c)840×(d)300 mm(±5%)  
重量：約3 kg  
材質：硬質ウレタン（内部）、ナイロン（外装・ベルト）

#### 3.動作原理

損傷した身体部位（上半身）に巻いて損傷部位を固定する。

### 【使用目的又は効果】\*

上半身に損傷のある傷病者の背面から体に合わせて包む。板状枕及び額・顎固定ベルトとの併用で、上半身を固定する。

### 【使用方法等】

#### （本器装着準備）

- 1.自動車等の衝突時のショックで頸部損傷が考えられるため、次により本器の装着が完全に終了するまで、一人が傷病者の頭部を確実に押えて固定すること。
- 2.最初に傷病者の体格に合った頸椎カラーを装着すること。

#### （本器の装着）

- 1.バックルを全て外し、ベルトをフリーの状態にする。
- 2.本器を傷病者と座席後部のシート間に差し込む。  
この時、傷病者と本器のセンターが一致する位置に微調整を行うこと。
- 3.位置が決まりましたら、脚部固定ベルトを引き出す。
- 4.次いで、本器の胴固定部を傷病者に巻き、下部2本の固定ベルトで仮止め（緩い状態）する。

- 5.左右のリフトハンドルで、本器が傷病者の脇に当たるまで持ち上げる。位置が決まったところで、仮止めた固定ベルトを確実に固定する。妊婦の場合は、腹部の圧迫に充分注意すること。
- 6.傷病者の左右の大腿部をそれぞれのベルトで固定すること。但し、大腿部、鼠蹊部に損傷がある場合は使用を避ける。（バックボード又はストレッチャーに乗せる場合は、大腿部固定ベルトを外す。）
- 7.本器と傷病者の頸部、背中に隙間が出来ないように、付属の板状枕又はタオル等を使用する。
- 8.頭部固定ベルトで傷病者の額及び頸椎カラーを固定する。但し、必要以上に締め付けないように注意すること。また、首の固定角度を変えないほうが良いと判断した場合は、板状枕又はタオル等で工夫して固定を行うこと。
- 9.最後に胴の一番上のベルトを固定し、同時に他のベルトに緩みが無いかを確認すること。
- 10.確認後、傷病者の状態に注意しながら移動・救出を行うこと。この時は、必ず2名以上で行うこと。

#### （使用後の取扱い）

- 1.血液その他の汚れを清拭・消毒し乾燥させて、次回の使用のために組み立てて、収納袋に保管すること。

### 【使用上の注意】\*

- 1.本器を装着する場合及び移動救出する場合は、二人以上で行うこと。
- 2.バックボード又はストレッチャーに乗せる場合は、大腿部固定ベルトを外すこと。搬送を開始する前には、他の患者固定ベルト等を使用してバックボード又はストレッチャーに確実に固定すること。
- 3.妊婦の場合は、腹部の圧迫に充分注意すること。
- 4.小児の場合で、隙間が開いてしまう場合は、毛布等を使用して隙間が無いようにすること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 1.貯蔵・保管方法  
常温・常湿
- 2.使用期限  
繰り返し使用可能。但し、本体に劣化が生じた場合は使用を避け、適切な方法で廃棄すること。

### 【保守・点検に係る事項】

- 1.救急時に備え、定期的な機能確認を実施すること。
- 2.不具合を発見した場合は、販売店又は製造販売業者に相談すること。
- 3.バルクロ・布等は時間経過とともに劣化する場合があるため、早めの交換を検討すること。

### 【製品に関してのお問い合わせ先】\*

株式会社ワコー商事（下記参照）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

「製造販売業者」

 株式会社  
WAKO SHOJI CO.,LTD.

〒251-0871 神奈川県藤沢市善行 7-3-5  
TEL.0466-84-2485/FAX.0466-84-2484

e-mail info@wako-shoji.com

URL http://www.wako-shoji.com/

「製造業者」

製造先国名：イタリア

製造業者名：メーバー社 ME.BER.S.R.L

その他詳細は、取扱説明書をご参照ください。