

販売名: パトリオット

一般医療器

再使用禁止

【警告】

1. 傷病者の体格に調整しサイズを選択すること。大きすぎる場合は頸椎が過度に伸展されることがあり、小さすぎる場合は確実な固定ができない。
2. 装着患者のサイズを計測し、適切な位置で確実に固定してから装着すること。
3. 装着したままサイズ調整は行わないこと。

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止
2. 頸椎固定に關し専門的な知識を有する方のみ使用可能。
3. 本器を傷病者に取り付けた後の位置の微調整は、頸部に負荷が掛からないように注意すること。
4. 本器の保管は平らの状態で行うこと。
5. 使用前には本器の状態を確認し、破損等を発見した場合は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

身体の損傷部位を固定するために用いるパッド入り器具をいう。本品は単回使用である。

2. 外観

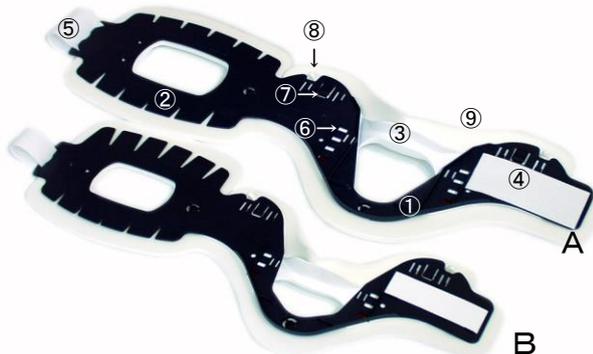

3. 形状・構造

- ①傷病者前面部
 - ②傷病者後方部
 - ③頸部固定部(スライド式)
 - ④ベルクロ(オス)
 - ⑤ベルクロ(メス)
 - ⑥固定サイズガイド
 - ⑦固定ロックボタン
 - ⑧カニューラホルダー
 - ⑨患者接触部
- A: アダルト用
B: チャイルド用

4. 寸法・重量

- A) アダルト: 587×125mm(±5%)・116g(±5%)
B) チャイルド: 475×85mm(±5%)・76g(±5%)

5. 原理

適度な強度を持ち、筒状に変形可能な材質で頸部を固定することにより、搬送時の振動等から起こりうる2次の損傷を防止する。アダルト用とチャイルド用があり、体格及び頸の太さに合致させることが可能である。

<品目仕様>

A) アダルト

- ・高さ調整範囲: 125・140・155・170mm
- ・適合首周り: 28~58cm

B) チャイルド

- ・高さ調整範囲: 85・97・109mm
- ・適合首周り: 20~45cm

- ・使用温度範囲: 常温・常湿

- ・保管温度範囲: 常温・常湿

【使用目的又は効果】

- ・損傷した身体部位を固定するために用いる器具をいう。身体に合うように形造る。

【使用方法等】

【使用前準備】


1. 傷病者の状態・状況を確認し、2次の被害を受ける可能性の有る場所であれば安全な場所まで移動させる。この時、頸部の動きを規制させるように手等で固定しながら行う。
2. 傷病者の体格に合ったサイズ(アダルト又はチャイルド)を選択する。この時、本器に異常が無いことを確認する。
3. 患者の頸のサイズを指で計測し、本器のサイズ(高さ調整)を決定し、装着後安易に変化しないように確実にロックさせる。



- ・肩の上部から頸の最下部の距離を、指の本数で測る。この時、上半身と頭の位置が自然で形で計測することを心掛ける。
- ・計測が不可能な場合は、計測後経験から得られる予想で仮の高さに固定するが、装着後必ず確認し、必要であれば再度サイズを変更すること。



- ・本器前面の「SIZING LINE」に計測した指(本数)を合わせ、傷病者のサイズに一番近くなるように移動部を移動させること。

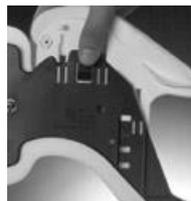

- ・成人サイズの場合、移動させたサイズ(TALL・REGULAR・SHORT・LOW)でロックボタンを押し込み、簡単に移動しないように確実に固定すること。
- ・小児サイズの場合、移動させたサイズ(INFANT・PEDI・PETITE)でロックボタンを押し込み、簡単に移動しないように確実に固定すること。



- ・傷病者が立っている場合は、本器の前面パネルを顎の下に装着し、本器の後方パネルを後頭部に回し、ループ状にして適度な力で締めベルクロで固定する。
- ・傷病者が寝ている場合は、本器の後方パネルを後頭部に回し、前面パネルを顎に装着させ、ループ状にして適度な力で固定すること。




- ・ベルクロの装着は確実にすること。劣化によりベルクロの固定が弱くなった場合は、使用を避け適切に廃棄すること。
- ・装着後固定状態を確認し、サイズの変更が必要と判断された場合は、ロックボタンを裏面から押し戻し、再度取り外し稼動部を変更すること。

【使用中の操作】

1. 傷病者の顎に下の本器の前面部を装着する。本器の後方部を傷病者の後頭部に通し、ベルクロで固定する。
2. 固定後緩み等が発見されたらベルクロで再固定を行う。この時、傷病者の顎が動かないように注意する。
3. 酸素投与等が必要と判断された場合は、適切なマスク又はカニューラを使用し酸素投与を行う。この時、酸素チューブをカニューラホルダーに差込固定させると簡単に外れることを防止できる。

【使用後の操作】

1. 本器は単回使用のため各自治体の規制に従い適切に廃棄する。

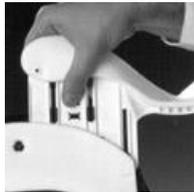

- ・本器を傷病者より取り外す。
- ・ロックボタンを裏側より押し返し、サイズを最小にしたうえで適切に廃棄すること。

【使用上の注意】

1. 本器は、成人（首周り：28～58cm・高さ変更＜125・140・155・170mmの4ポジション）及び小児（首周り：20～45cm・高さ変更＜85・97・109mmの3ポジション）に合うように設計されているが、サイズが合わない場合は使用を避けること。
2. 高さの固定は確実にを行い、使用中に外れたりしないように注意すること。
3. 使用経過に置いて患者接触面の破損や汚れ、本体の劣化及びロック部の固定が甘くなった場合は使用を中止し、適切な方法で廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・使用回数：単回使用

【保守・点検に係る事項】

1. 本品は、単回使用品である。使用前に破損があった場合は使用を中止し、新しい商品と交換すること。
2. 使用後は、各自治体の指示に従った廃棄方法を行うこと。

【お問い合わせ先】

株式会社ワコー商事

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

「製造販売業者の名称」



〒251-0871 神奈川県藤沢市善行 7-3-5
TEL.0466-84-2485/FAX.0466-84-2484
e-mail info@wako-shoji.com
URL <http://www.wako-shoji.com/>

「製造業者の名称」***

製造業者名：

1. Wealthy Plastic & Electronic Products Company Limited. (中国/成人・小児用製造)
2. Ossur North America (メキシコ/小児用製造)

本書は、取扱説明書を兼ねています。必ずお読み頂き大切に保管して下さい。