

医療用品（O4）整形用品
一般医療機器 救急絆創膏（34864000）

Bolin チェストシール

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
（一度開封して放置した製品の使用や再滅菌の禁止）

【形状・構造及び原理等】

<外観>




<概要>

本器は、主に胸部の傷の被覆及び保護・傷口の皮膚接合・身体の創傷部位の支持等に用いる。穿通創が考えられる場合でも、一方向弁により空気を排出でき外気の流入を防ぐことも可能にしている。また、本器を傷に装着する際に、傷の周りの汚れや異物等を拭き取るためのガーゼパッドも同封されている。

構成品：チェストシール/ガーゼパッド各1枚入り

<構造>

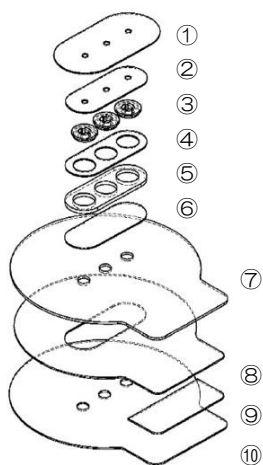

番号	原材料
①	ポリエチレン
②	アクリル PSA
③	ポリエチレン
④	アクリル PSA
⑤	ポリエステル
⑥	ポリエチレン
⑦	ポリウレタン
⑧	アクリル粘着剤
⑨	ポリエチレン
⑩	ポリウレタン

※ガーゼパッド：綿

<包装>


1式/包装

【使用目的又は効果】

身体の一部に用いる、接着剤を付したプラスチック製の絆創膏材をいう。傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の一部の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

1. パッケージを開封します。
2. チェストシールとガーゼパッドを取り出します。
3. ガーゼパッドを用い、チェストシールを装着する前に周りの汚れや異物等を拭き取ります。
4. 剥離シートを剥がします。
5. 粘着部を下にして、傷の向きに沿って一方向弁が傷の上に重なるようにチェストシールを貼り付けます。

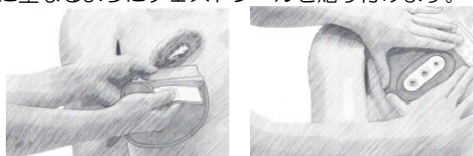

6. 密着性を高めるために適度な圧力で患部に押し当てます。
7. 本器の取り外しは、医師若しくは医師の指導又は監視下で行います。

【使用上の注意】

1. 使用前に本品が使用期限内であることを確認して下さい。
2. 包装に使用期限表示のないもの、使用期限後のものは使用しないで下さい。
3. 包装が開封、破損している場合は使用しないで下さい。
4. 本品は開封後直ちに使用して下さい。
5. 使用後は医療廃棄物として廃棄して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

<貯蔵・保管方法>

- ・水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて清潔な場所で保管する。（常温・常湿）
- ・火気の恐れのない場所で保管すること。

<有効期限>

- ・外装に記載（滅菌後5年間）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

「製造販売業者の名称及び住所」



〒251-0871 神奈川県藤沢市善行 7-3-5
TEL 0466-84-2485/FAX 0466-84-2484
e-mail info@wako-shoji.com
URL <http://www.wako-shoji.com/>

「製造業者の名称及び国名」

Polymer Science, Inc.（アメリカ）