


（医 04）整形用品
一般医療機器 救急絆創膏（34864000）
H-VENT チェストシール

再使用禁止**【形状、構造及び原理等】**

1. 形状

本体

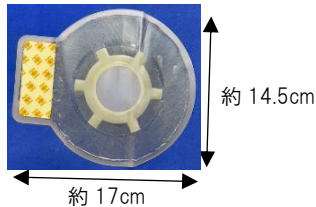

ガーゼパッド

パッケージに同封



2. 原材料

本体

粘着面：接着性ハイドロゲル

バルブ：熱可塑性ポリウレタン

ライナー：ポリエチレンテレフタレート

ガーゼパッド：コットン

3. 原理

本器は、主に胸部の傷の被覆及び保護・傷口の皮膚接合・身体の創傷部位の支持等に用いる。穿通創が考えられる場合でも、6 か所に配された一方弁により空気を排出でき創傷部における外気の流入を防ぐことを可能にしている。また、本器を傷に装着する際に、傷の周りの汚れや異物等を拭き取るためのガーゼパッドも同封されている。

【使用目的、又は効果】

身体の部位に用いる、接着剤を付したプラスチック製の絆創膏材をいう。傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

パッケージを開封し、製品を取り出す。

タブを持ち以下の手順でチェストシールを貼り付ける。



ガーゼパッドで創傷部位の周りをきれいに拭き取る。
親指をタブの白い面に当て、タブをしっかりを持つ。タブがシールの基部よりはがれた場合は透明なベースを引っ張らないようにする。ゆっくりとライナーを剥離し、粘着面のハイドロゲルを露出させる。



粘着面を下にして傷の上に置く。この時、一方弁を創傷部位の中心にくるようにする。
チェストシールを押し当ててしっかりと密閉する。

【使用上の注意】

- ・突起物の上に貼らない。（創傷の悪化、またはバルブが破損する可能性がある。）
- ・バルブを閉塞させない。（バルブ機能を損なう可能性がある。）
- ・適用は 24 時間以内とする。
- ・チェストシールを切断しない。（機能を損なうため。）
- ・不快感、アレルギー反応、または炎症がある場合は、その部分を慎重に取り除き、洗浄し、医師の指示を仰ぐこと。
- ・使用期限を経過した製品を使用しない。
- ・パッケージに破損、開封がある場合は使用しない。
- ・使用後は医療廃棄物として適切に廃棄する。
- ・チェストシールの取り外しが困難な際は、水または生理食塩水を用いて灌流または浸漬しながら取り除く。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて清潔な場所で保管する。
- ・火気の恐れのない場所で保管すること。

2. 有効期間

パッケージに記載（25kGyガンマ線滅菌品）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〒251-0871 神奈川県藤沢市善行 7-3-5

TEL.0466-84-2485 FAX.0466-84-2484

<https://www.wako-shoji.com>

外国製造業者：Polymer Science, Inc.(アメリカ合衆国)