

2015年7月22日作成 (第1版) 類別: 医 04 整形用品

一般医療機器

一般的名称: 医療用不織布(JMDN コード:34655000)

プラスモイストDC-W

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1.原材料

ポリエチレン、ポリプロピレン、セルロース等

2.形状・構造

不織布を挟んで、両面にポリエチレンからなるメッシュシートが付与されたシート材であり、個包装後電子線滅菌を行う。

<断面模式図>



3.原理

メッシュシートは全面が微細孔を有するセル構造で、本品と創部との固着を防ぐ。過剰な浸出液等が生じる場合は不織布が浸出液を吸収することで、健常皮膚部での浸出液に起因する浸軟、カブレ等の皮膚障害を抑制する。また、本品は通気性に優れ、使用時の健常皮膚部の発汗や不感蒸泄によるムレを軽減する。

4.サイズ

製品番号	規格	入数/袋
DWA3C	125mm×125mm	5枚入

【使用目的又は効果】

創傷面を被覆・保護する

【使用方法等】

本品はディスポーザブル製品であるので、一回限りの使用のみで再使用はできない。

1. 創部を生理食塩液又は消毒液等で十分に洗浄する。また、消毒液を用いた場合は消毒液が残らないように生理食塩液等で十分に洗い流す。

(本品交換時にも必ずこの処置を行うこと。)

2. 周囲の健常皮膚も十分に被覆できる形状・サイズに缺等でカットする。
3. 本品を創部に当て、包帯、ネット、サージカルテープ、フィルムドレッシング等で本品が動かない程度に固定する。なお、本品は表裏共に同形状のメッシュシートで構成されているため、表裏の区別なく創部に使用できる。

【注意】

消毒薬や脱色剤、有機溶剤との併用はしないこと。

また、原則、軟膏、クリーム、オイル等の薬剤と併用しないこと。

4. 本品は固着し難いが、除去が困難な場合には、本品と創面との接触面に生理食塩液等をシリンジ等で流すか又は生理食塩液等をしみこませたガーゼ等でぬらし、少しずつ剥がすこと。
5. 通常、浸出液がもれ出すまで、連続で使用できるが、早めの交換を推奨する(少なくとも1日1回の本品の交換と創部の洗浄操作を推奨する)。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 創に本品が原因と推察される感染が起きた場合には直ちに使用を中止し、適切な治療を行う。

2. 皮膚障害と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
3. 創の観察を十分に行い、浸出液の量や創の状態に応じ、適切な交換及び処置を行うこと。
4. 眼の周囲、口腔内などの粘膜器官には使用しないこと。

その他の注意事項

1. 開封前に包装が破損又は汚損している場合は使用しないこと。
2. 変色、剥離等が認められる場合は、使用を中止すること。
3. 開封後はチャック袋を完全に閉め、小児の手の届かないところに密封保管する。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 直射日光を避け、湿気の少ない所に保管する。

有効期間: 製品包装に記載(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社瑞光メディカル

〒566-0062

大阪府摂津市鳥飼上四丁目3番50号

電話: 072-653-8877