

ゼットエヌシーK

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造

粘着テープに多層構造のシート材からなるパッドがついて
います。パッドは、キズ口接触面であるメッシュシートと
吸収性能を有する不織布シートからなります。
パッドと粘着テープを覆う形で剥離紙が付加されています。

2.材質

パッド：ポリエチレン、ポリプロピレン等
粘着テープ：ポリ塩ビフィルム、アクリル粘着剤等
剥離紙：紙、シリコーン樹脂

3.原理

パッドがキズ口を覆い、保護します。パッドのキズ口接触
面となるメッシュシートにより、キズ口の乾燥やかさぶた
形成の結果生じる本品とキズ口との固着を防ぎます。また、
メッシュシートを透過した浸出液等を不織布シートで吸収
します。
防水性のある粘着テープは、パッドをキズ口にしっかり固
定します。
パッドと粘着テープの粘着面を保護するため剥離紙がつい
ていますが、使用時には容易にはがすことができます。

＊4.サイズ

サイズ(mm)	
パッド	テープ
12×21	19×72
19×22	28×72
25×30	45×50
30×40	50×70

【使用目的又は効果】

キズの被覆及び保護

【使用方法等】

一度使用したものは再度使用しないでください。
キズ口を水道水等でよく洗い、水気をふき取った後、本品
のパッド部をキズ口に当て、粘着テープをしっかり押さえ
て貼ってください。
はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿って、ゆ
っくりはがしてください。

【使用上の注意】

- 次の方は、使用前に必ず医師に相談してください。
・糖尿病や血行障害の治療を受けている方
・感染を起こす可能性のあるキズ（低温やけど、深いキズ、
動物などに咬まれたキズ、ガラス・木片・砂などの異物
が入っているキズ）に使う方
- 次のところには使用しないでください。
・感染したキズ（キズ口の周囲が赤い、熱・はれがある、
ズキズキした痛みが続く）
・壊死組織があるキズ
・膿をもつ等の異常があるキズ
・にきびやとびひ等の皮膚感染
・眼の周囲、粘膜
・成因不明のキズ
- 本品の使用により、強い痛み、キズ口の周囲が赤くはれ
る、発疹、かゆみ等が生じた場合は使用を中止し、医師
または薬剤師に相談してください。
- 消毒液を使用した場合は、水道水等で十分に洗い流して
ください。
- パッドサイズより大きなキズには使用しないでください。
- 粘着面をキズ口に貼らないでください。
- 浸出液がもれた場合は、新しいものに貼り替えてくださ
い。
- 長時間貼付せず、少なくとも1日1回交換してください。
- 個包装が破れたり、開けられたものは使用しないでくだ
さい。
- 本品は未滅菌品です。

【保管方法及び使用期間等】

保管方法

直射日光を避け、なるべく湿気の少ない、小児の手の届か
ないところに保管してください。

有効期間

使用期限：製品包装に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社瑞光メディカル
〒566-0062
大阪府摂津市鳥飼上四丁目3番50号