

## ブレストセルフチェッカー

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- 1 皮膚に炎症、傷、湿疹、かぶれ過敏症などの皮膚異常がある場合は使用しないこと。
- 2 再使用をしないこと。

#### 【形状・構造及び原理等】

PP フィルム 4 層構造で構成し触診には、皮膚面に 2 層あるいは 3 層フィルムとなるようミトン状部を指に挿入し、指先を滑らす事で皮下内の状態を検出し易くしている。また、皮膚面を 3 層にする事で、その感覚をより敏感にできる。  
\*PP は、ポリプロピレンの略で広く医療機器等に使用されています。

#### 【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るため使用する合成素材製手袋。歯科用手袋を除く。

#### 【使用方法等】

本品は、検査者あるいは被験者により乳房検査を目的とした仕様としています。乳房等の軟組織の検査は、表皮と指との動摩擦を軽減することでより実施し易くなります。

#### 【使用上の注意】

- 1 自己検診により異常を感じた場合は、直ちに医師に相談すること。
- 2 本品は、補助的であり医療施設による定期健診を受けること。
- 3 本品の使用以外での使用は避けてください。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 保管方法

- 1 直射日光を避け、高温多湿で無い場所に保管してください。
- 2 包装材料を傷つけないように注意の上、保管してください。

##### 使用期間

滅菌年月日より 5 年以内とし、使用期限を過ぎたものは破棄してください

#### 【保守・点検に係る事項】

- 1 開封し、使用しなかったものは破棄してください。
- 2 一度使用したものを再使用はしないでください。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者の内容を自由に入力します>

製造販売業者：有限会社ワンリッチインターナショナル  
〒950-2123 新潟県新潟市西区笠木3157-1  
1 電話：090-1423-2200