

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋（JMDNコード：70976000）

WONDER NITRILE GLOVE
（ワンダー ニトリルグローブ）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

本製品は、合成ゴムを使用した左右兼用平手タイプの使い捨て手袋である。パウダーフリーで指先にエンボス加工を施している。

原料:合成ゴム

サイズ:

単位(mm)	幅	長さ	厚さ
S	85±3	240以上	0.05以上
M	95±3	240以上	0.05以上
L	105±3	240以上	0.05以上

滅菌/未滅菌:未滅菌

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

箱を開封し手袋を取り出す。

取り出した手袋を爪などで傷つけないよう十分に注意しながら、手に装着する。

【使用上の注意】

- ・本品を使用中に、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師による適切な処置を受けて下さい。
- ・包装が破損しているものや、汚れているもの、製品そのものに異常（破損やピンホール等）が見られるものは使用しないで下さい。
- ・刃物等の鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開くことがあるので注意して下さい。
- ・交差感染防止の為、別の患者を診察する際には、新しいものに交換してください。

〈相互作用〉

薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上、使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。蛍光灯などの人工光線やX線機器の周り等も避けることが望ましい。

〈有効期間〉

製造日より5年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

万達株式会社

東京都豊島区北大塚3丁目6番4号

Tel:03-3949-0956

〈外国製造業者〉

①国名:中国

業者名:SIYANG JAYSUN MEDTECH CO.,LTD.

②国名:中国

業者名:SHANDONG INTCO MEDICAL
PRODUCTS CO., LTD