

## 再使用禁止

## アルファーズ

## 【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) 体内に留置しないこと

本品が体液や薬液を過剰に吸収して湿潤した場合は、衛生管理および感染防止の観点から、新しいものに交換する。

## 【形状・構造及び原理等】

## 形状・構造



	仕様	包装形態
1	12.5×12.5 cm、4枚重ね（4ply）	200枚／紙袋（Paper bag）
2	15×15 cm、4枚重ね（4ply）	200枚／紙袋（Paper bag）
3	20×20 cm	200枚／紙袋（Paper bag）

## 原理

本品は、スパンレース不織布（レーヨン繊維およびポリエステル繊維を本比率で構成）を裁断・折り加工して製造された吸収性の被覆・保護材である。

## 【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。である。

## 【使用方法等】

## 1. 初包装（一次包装）の確認

使用前に、初包装の完全性を必ず確認する。

初包装が破損している、またはすでに開封されている場合は、本品を使用しない。

## 2. 開封と取り出し

初包装を開封し、本品を清潔な状態で取り出す。

## 3. 使用方法

・本品を創傷周囲の健常皮膚表面に軽く覆うように配置する。

・本品は以下の用途に用いる。

創周囲の体液滲出物の清拭および吸収

外用薬の塗布時の媒介材としての使用

## 4. 交換の目安

## 【使用上の注意】

- ・本品は単回使用品であり、再使用・洗浄・再生・再滅菌を行わないこと。
- ・本品を体内に留置しないこと。
- ・使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

- ・本品は 直射日光を避け、湿気の少ない清潔な環境において、室温（通常 5～30℃）で保管する。
- ・高温多湿、極端な低温、急激な温度変化のある場所での保管は避ける。
- ・水濡れ、汚染、圧迫、虫害等を受ける可能性のある場所での保管は避ける。
- ・小児の手の届かない場所に保管する。
- ・包装が破損した場合は使用しないため、輸送・保管時には外装の損傷に注意する。
- ・化学薬品、揮発性物質、強い臭気を発する物質の近くには保管しない。
- ・有効期間：5 年

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

## 製造販売業者

名称：株式会社 Wiselink Japan

住所：東京都大田区山王 2-1-8 山王アーバン  
ライフ 201 号室

製造業者：Kingstar Medical  
(Xianning) Co., LTD  
(きんぐすたー めでいかる しあんにな  
かんぱにーりみてっど)

製造国：中華人民共和国