

C503



きず

目立たない半透明タイプ



指定医薬部外品

1サイズ18枚入

きりきず
すりきず
靴ずれに

目立たない半透明タイプ

●目立たない
半透明タイプ

救急絆創膏

デルカットバン

DERCUTBAN



KOKANDO CO., LTD.



使用期限

製造記号

シア
1-18

救急絆創膏
デルカットバン

指定医薬部外品

救急絆創膏
デルカットバン
DERCUTBAN

押して開ける

効 能
成 分
用 法
ガーゼ 10g 中 日本薬局方アクリノール水和物 20mg

【用法・用量に関する注意】

(1)患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用してください。(2)粘着面を患部に貼らないでください。(3)パッド部分が濡れたり、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、貼り替えてください。(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(5)使用後は必ず、患部やまわりの皮膚をいためないようにゆったりとはがしてください。(6)パッド部分に使用しているアクリノール水和物の消毒効果を弱めるので、ヨードチンキと同時に使用しないでください。

▲【使用上の注意】

■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【保管及び取扱上の注意】

- 使用に際しては、この面に記載の事項をよく読んでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【お問合わせ先】

阿蘇製薬株式会社
お客様相談窓口 096-232-3933
9:00~17:00まで(土・日・祝日を除く)

販売名 デルカットバンA
19mm×72mm 18枚入 ￥250+税

発 売 元 株式会社 廣 貴 堂

富山市梅沢町2丁目9-1

製造販売元 阿蘇製薬株式会社

熊本県菊池郡菊陽町津久礼91-1

紙 個包装
箱

きず
も
れ

目立たない半透明タイプ



4

954097390116

011017△

