

救急絆創膏



新素材で水に強い

新形状(わん曲)でピッタリ



きずパットフィットN

カルタイプ


第3類医薬品

新素材使用



1サイズ24枚入

- 水に強い
- おれにくい
- のび～る

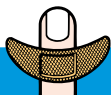

新素材で水に強い

配置期限

ロット番号

カルタイプ
新素材使用

救急絆創膏

1サイズ24枚入

T01

品目番号 追18-74-608

第3類医薬品

きずパットフィットN

△ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

効能又は効果

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒・被覆

用法及び用量

中央のパッドに触れないようにして剥離紙を取り除き、パッドが傷口に当たるように貼る。

(用法及び用量に関連する注意)

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用してください。また、貼る際は、引く張らないで軽く圧着してください。
- (3) 粘着面を患部に貼らないでください。
- (4) 皮膚の特に弱い人は、絆創膏部分を同じところに続けて貼らないでください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6) 本剤はパッド部分にアクリノールを使用しています。アクリノールの殺菌効果を弱めるので、ヨードチンキと同時に使用しないでください。

成分及び含量

パッド100g中 アクリノール水和物 0.8g
添加物として、マクロゴール、メチルセルロース、ガーゼ、ポリエチレンネットを含有する。

(保管及び取り扱い上の注意)

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手や足のつかない所に保管してください。
- (3) 配置期限を過ぎたものは使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電話: 076 (479) 1313 (土、日、祝日を除く)

受付時間 9:00～17:00

製造販売元



大協薬品工業株式会社

富山市水橋町等173

紙 : 箱



外装フィルム

内容 19mm×70mm

24枚入 ¥500+税

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouinai.html>
電話: 0120-149-931 (フリーダイヤル)

TA20-117



0 1 2 4 8

0000-2399