

キズパスタフィット[®]N

すり傷
きり傷

ピタッと貼れる

伸縮タイプ

第3類医薬品

キズパスタフィット[®]N

すり傷
きり傷

ピタッと貼れる

伸縮タイプ

消毒
殺菌

透湿

透気

傷口につかない
特殊ネット加工

1サイズ50枚入

第3類医薬品

新素材で、ムレにくく伸びて貼り易い



4 954097 775302

使用期限

ロット番号

第3類医薬品

すり傷
きり傷

1サイズ50枚入

キズパスタフィット[®]N

ピタッと貼れる

伸縮タイプ



すり傷



きり傷



T01

第3類医薬品



救急絆創膏 販売名：キズプラスターフィットN

△ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

効能又は効果

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒・被覆

用法及び用量

中央のパッドに触れないようにして剥離紙を取り除き、パッドが傷口に当たるように貼る。

(用法及び用量に関連する注意)

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用してください。
また、貼る際は、引っ張らないで軽く圧着してください。
- (3) 粘着面を患部に貼らないでください。
- (4) 皮膚の特に弱い人は絆創膏部分を同じところに続けて貼らないでください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6) 本剤はパッド部分にアクリノールを使用しています。アクリノールの殺菌効果をも弱めるので、ヨードチンキと同時には使用しないでください。

成分及び分量

パッド100g中 アクリノール水和物 0.8g

添加物として、マクロゴール、メチルセルロース、ガーゼ、ポリエチレンネットを含有する。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口 ☎ 076-479-1313 (土、日、祝日を除く)

受付時間 9：00～17：00

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

発売元 日本薬剤株式会社

富山市東中野町一丁目1番1号

製造販売元 大協薬品工業株式会社

富山市水橋島等173



1枚(7.0cm×1.9cm)

伸縮タイプ

キズプラスターフィットN



すり傷
さし傷
1サイズ50枚入

第3類医薬品

ピタッと貼れる