

平成 22 年 2 月 5 日

家庭用電気マッサージ器の正しい使用について (注意喚起)

1. 概要

家庭用電気マッサージ器は、家庭で使用する医療機器であり、取扱い説明書等をよく読み、正しく使用する必要があります。正しく使用していれば、防げたと考えられる死亡事故が発生しておりますので、家庭用電気マッサージ器の使用者に対して、「2」について注意喚起いたします。

2. 家庭用電気マッサージ器の使用で注意いただきたいこと

「カバーを外したり、破れた状態での使用は大変危険なため、絶対にしないで下さい。」

3. 厚生労働省に報告された死亡事故の概要

1) 販売名：アルビシェイプアップローラー

製造販売業者名：株式会社 的場電機製作所

販売期間：昭和 58 年から平成 2 年（販売台数：約 42 万台）

事故の概要：布カバーを外した状態で使用したところ、
衣服が巻き込まれたことにより、窒息となり死亡した。

事故発生年等：平成 11 年栃木県、平成 15 年香川県、平成 20 年北海道 各 1 例
(平成 20 年 12 月 16 日公表)

2) 販売名：ハンディーマッサージャー GM-2（愛称：もみ太くん）

製造販売業者：株式会社フジ医療器

販売期間：平成 7 年から平成 15 年（販売台数：約 11 万台）

事故の概要：布カバーが破れた状態で使用したところ、
マフラーが巻き込まれたことにより、窒息となり死亡した。

事故発生年等：平成 22 年静岡県 1 例
(平成 22 年 2 月 5 日公表)

4. その他

上記の死亡事故の報告があった家庭用電気マッサージ器に限らず、家庭用電気マッサージ器の誤った使用による事故の発生を防止するため、業界団体である社団法人日本ホームヘルス機器協会に対して、適正使用の呼びかけ等、対策の検討を依頼しております。

(照会先)

医薬食品局安全対策課

電話：03-5253-1111（内線 2751,2758）

夜間直通：03-3595-2435

薬食安発第1216001号
平成20年12月16日

社団法人日本ホームヘルス機器協会会長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

家庭用電気マッサージ器の適正使用に関する情報提供の実施について

家庭用電気マッサージ器（家庭用の電気マッサージ器との組み合わせ医療機器を含む。以下同じ。）については、添付文書又は取扱い説明書における注意事項に従い、正しく使用する必要があります。

しかしながら、正しく使用していれば、防げた可能性のある死亡を含む重大な健康被害の生じた事故に関する報告がなされており、厚生労働省としても家庭用電気マッサージ器の適正使用に関する注意喚起と事故事例の公表をホームページ (<http://www.mhlw.go.jp>) 等で行ったところです。

ついては、貴会におかれても、同様の事故を防止するため、家庭用電気マッサージ器の適正使用に関する情報について、誤った使用方法による健康被害のリスクを含め、広く消費者に向けて提供するよう願います。

利用者の皆様へ

家庭用電気マッサージ器の適正使用のお願い




社団法人 日本ホームヘルス機器協会

家庭用電気マッサージ器は、取扱説明書のとおり使用していただくとともに、特に次の事項を守って正しくご使用ください。

1. 家庭用電気マッサージ器のカバー（布・革など）を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。
また、本体カバー（布・革など）に破れがある場合は、使用を中止し、必ず修理に出してください。

※衣服や髪が巻き込まれることによる死亡や事故が報告されております。

（主な種類）

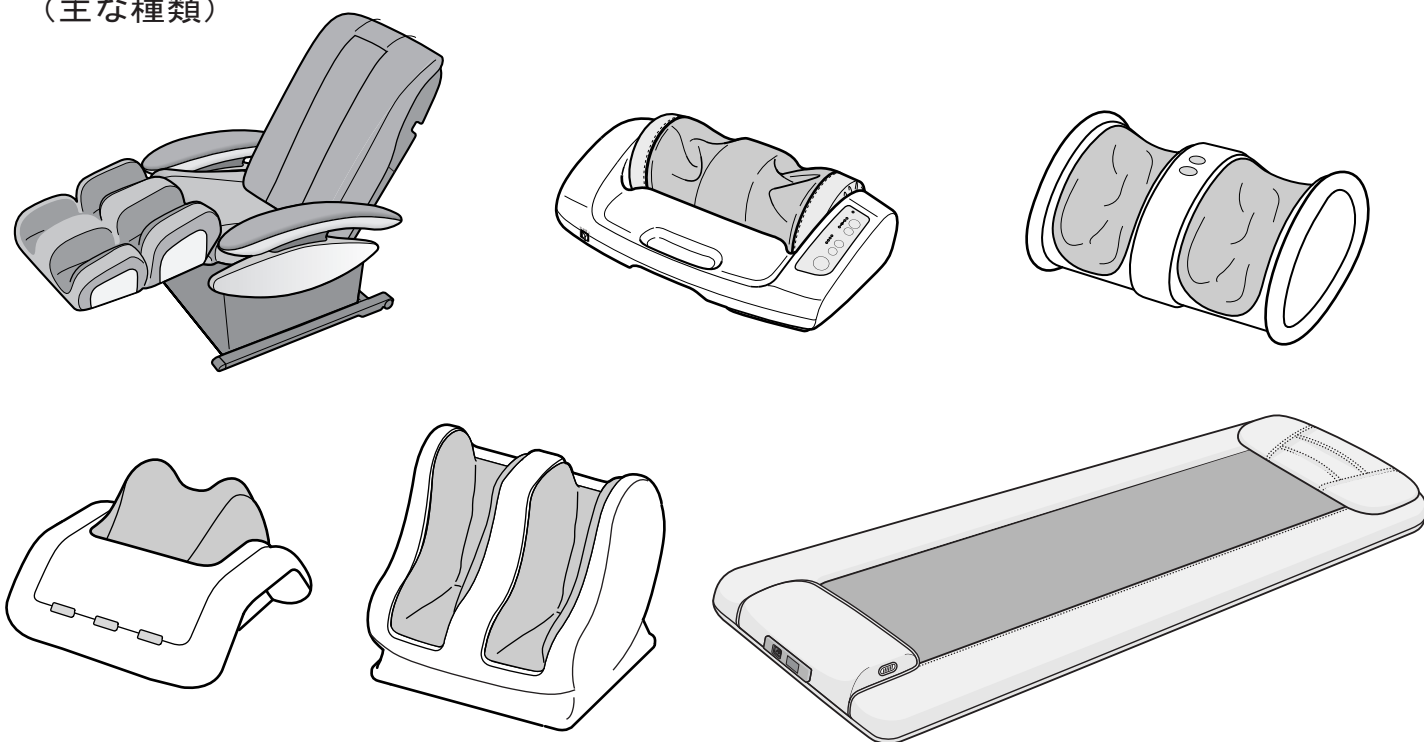

2. お子様を家庭用電気マッサージ器で遊ばせないでください。
また、使用後は安全のために、電源スイッチを「切」にしてください。

※転倒や本体に挟まることによる事故等が報告されております。

（例）



お問い合わせ先：この紙面についてのお問い合わせは ☎ 0120-744-714（平日 9：00～17：00時）
なお、製品に関するお問い合わせにつきましては、製造企業にお問い合わせください。

平成 20 年 12 月 16 日

株式会社 的場電機製作所

家庭用ローラー式電気マッサージ器の適正使用のお願い（注意喚起）

・弊社が昭和 61 年に製造いたしました、家庭用ローラー式電気マッサージ器「アルビシェイプアップローラー」を、布カバーを装着しない状態で使用して、衣服を巻き込み死亡する事故が発生いたしました。

亡くなられた方とご遺族の皆様に対しまして心より深くお悔やみを申し上げます。

弊社としては、社告やホームページ等を通じて、全国のご愛用者の皆様に、布カバーを外したり、破れた状態での使用は大変危険なため、絶対にされないよう、お知らせいたします。

しかしながら、販売台数も多く、販売会社の倒産等で販売先を特定することは極めて難しく、本日、下記の内容について記者会見を行い、注意喚起をお願いすることとした次第でございます。

弊社では今後とも、お客様により安全でより喜ばれる商品を提供できるよう一層の努力をしてまいります。これからもご理解、ご指導を賜りますようお願いいたします。

記

1) 対象商品名

(商 品 名)	(型 式)
① アルビシェイプアップローラー	
② シェイプアップローラーⅡ	S R - 5 1 1 8

2) 発生事故の概要

- ・平成 20 年 12 月 2 日 北海道で 50 代の女性
- ・平成 15 年 香川県で 60 代の女性
- ・平成 11 年 栃木県で 40 代の女性

3) 事故発生商品

3 件ともアルビシェイプアップローラー

4) 事故原因

3 件ともカバーのない状態で使用したため衣服を巻き込み窒息したことにより死亡

5) お客様に徹底をお願いしたい事項

布カバーを外したり、破れた状態での使用は大変危険なため、絶対にしないでください。

本製品の取扱説明書で安全のためカバーをはずして使用しないよう明記してあります。

6) 本製品の構造

本製品はローラーの回転によってマッサージの効果を出す構造になっているため、カバーによってローラーに直接触れないようにして安全性を確保してあります。そのためカバーの装着は絶対条件です。

7) 販売期間、販売台数

- | | | |
|-----------------|---------------------|----------|
| ①アルビシェイプアップローラー | 昭和 58 年 8 月から平成 2 年 | 約 4 2 万台 |
| ②シェイプアップローラーⅡ | 昭和 63 年 7 月から平成 8 年 | 約 3 6 万台 |

8) 販売場所

全国の百貨店、スーパー等の催事場での販売

9) 商品の特定方法

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| ①アルビシェイプアップローラー | 商品本体側面に商品名を記載したラベルを貼付 |
| ②シェイプアップローラーⅡ | 商品本体裏面に商品名を記載したラベルを貼付 |

10) 安全装置（過負荷保護装置）

- ①、② とともになし

11) 注意喚起の方法

- ①新聞に社告を掲載して全国に注意喚起いたします。
- ②弊社への修理依頼やカバーの注文を頂いたお客様に注意喚起の案内を送ります。
- ③弊社のホームページに注意喚起のお知らせを掲載します。
- ④社団法人日本ホームヘルス機器協会さまに注意喚起のお願いをします。

12) 現在製造中の類似機種

- ①ローサーマルチリフレクサー
- ②プチローラー

ともに過負荷保護装置とカバー未装着停止装置が付いております。

添付資料

- ①対象商品の確認箇所
- ②アルビシェイプアップローラー取扱説明書抜粋
- ③シェイプアップローラーⅡ取扱説明書抜粋

参考：会社概要


社 名： 株式会社の場電機製作所
住 所： 埼玉県川越市の場 2 6 2 7 番地 5
代表者： 廣 澤 隆 興（ヒロシ タカキ）
事業内容： 小型モータ、健康機器、モータ応用機器等の製造
資本金： 7, 9 7 2 万円
創 業： 昭和 3 7 年 3 月

<連絡先>


株式会社の場電機製作所 お客様相談室
住 所 〒350-1101 埼玉県川越市の場 2 6 2 7 番地 5
電話番号 0 4 9 - 2 3 1 - 2 2 5 5
(受付時間) 平日 9 時から 17 時まで (土日・祝日を除く)

販売名確認箇所

① アルビシェイプアップローラー

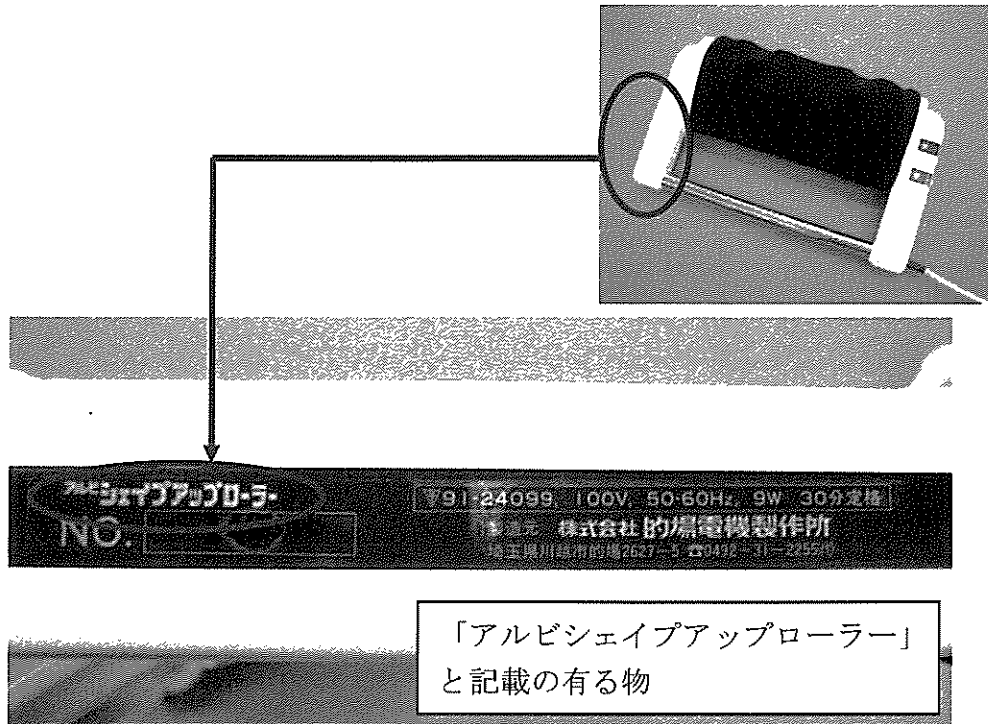

② シェイプアップローラーⅡ

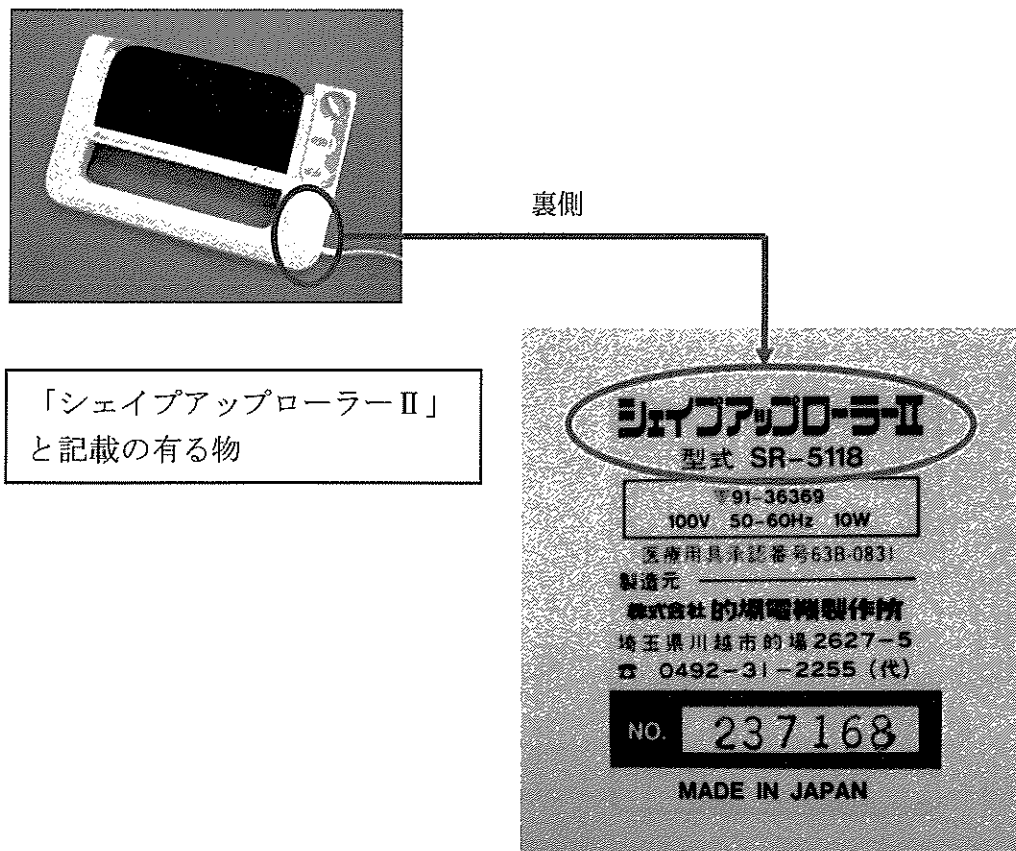

アルビシェイプアップローラー取扱説明書より抜粋

表紙

アルビシェイプアップローラー


ご愛用
しおり

SHAPE
UP
ROLLER

本器を正しくご使用いただくため、ご使用前に
必ずこのしおりをお読みください。また、お読み
になられたあとで大切に保管してください。

使用上のご注意


- 安全のためカバーをはずしたままでご使用にならないでください。また、回転しているローラーの間に指や物品等を入れないでください。

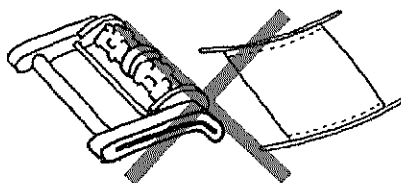

使用上の注意より抜粋

仕様・定格

■各部の名称

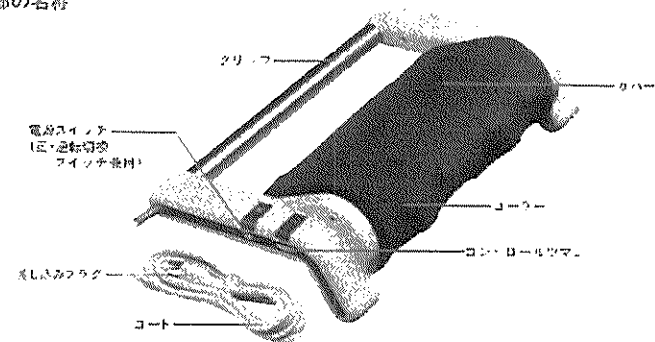

■定格・仕様

定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz
自 費 電 力	3W
定 格 時 間	30分
ローラーの回転数のコントロール範囲	約30回～約150回/分
ローラーの回転方向	正方向及び逆方向の両向き
ローラーの数	24個

※安全のため、お目撃・電撃の恐れがあります。

シェイプアップローラーⅡ取扱説明書より抜粋


表紙

取扱説明書

保証書付

ご使用前に必ずお読みください。


このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用時に、この取扱説明書をよくお読みください。正しくお使いください。

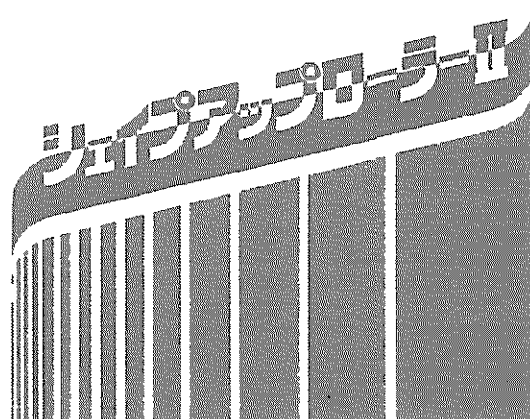

あなたの健康の
BEST CARE

使用上のご注意


- 安全のためカバーをはずしたままでご使用にならないでください。また、回転しているローラーの間に指や物品等を入れないでください。

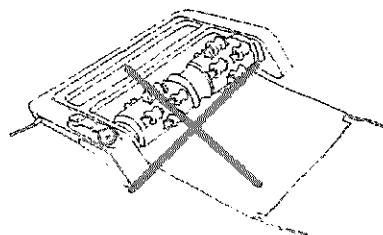

使用上の注意より抜粋

仕様・定格

図各部の名称

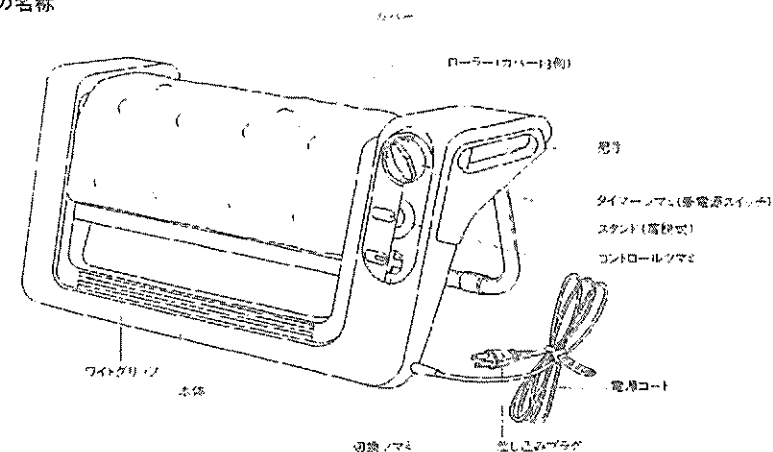

図定格・仕様

●電圧・定格周波数	100V 50/60Hz	●機種名	シェイプアップローラーⅡ(型式SR-5118)
●消費電力	10W	●重量	3.4kg
●動作時間	連続	●最大寸法	444×229×129 mm
●タイマー最大時間	70分	●医療器具承認番号	63B-0931
●ローラーの回転数	50Hz: 地区-約45-60回転/分 60Hz: 地区-約37-60回転/分	●型式認可番号	電91-35363
●ローラーの寸法	72		
●安全装置	サーモリミット 内蔵		

※改良のため、一部仕様の変更をすることがあります。

家庭用ハンディーマッサージ器の適正使用のお願い(注意喚起)

弊社が昭和 58 年から平成 15 年まで販売しました家庭用ハンディーマッサージ器の使用上におきまして、布カバーを切り取られた跡がある状態で使用し、むき出しになった内部の駆動部に利用者が着用していたマフラーの一部が巻き込まれ死亡するという事故が発生しました。

亡くなられた方とご遺族の皆様に対しまして心より深くお悔やみを申し上げます。

弊社としましては、製品取扱説明書において注意を喚起してまいりましたが、改めましてホームページ等を通じてご愛用者の皆様に「布カバーを切り取ったり、破れた状態での使用は非常に危険である」ことを重ねてお知らせいたします。

また、より多くの方々に適正な使用方法についてお知らせしたく、下記の内容にて注意喚起をお願いすることとした次第です。

ご理解、ご指導を賜りますようお願いいたします。

記

1) 対象製品

- ① もみ太くん MK-1
 - ② ハンディーマッサージャー GM-2 (愛称：もみ太くん)
- 注：販売名は異なりますが同一製品です。

2) 発生事故の概要

平成 22 年 1 月 25 日 静岡県の 70 代の男性

3) 事故発生商品

ハンディーマッサージャー GM-2


4) 事故原因

布カバーを切り取り、駆動部がむき出しの状態で使用されたため、首に二重に巻いていたマフラーの一部が巻き込み窒息したことにより死亡。

5) お客様に徹底をお願いしたい事項

<警告>

ついている布カバーを外したり、ハサミ等で切り取ったりする行為は絶対にしないでください。
また、布カバーが消耗等で少しでも破れたり、穴が開いたりした場合は、ただちに使用を中止し、フジ医療器お客様相談窓口にご連絡ください。
ご自身で修理・改造を行うことは危険ですので絶対おやめください。

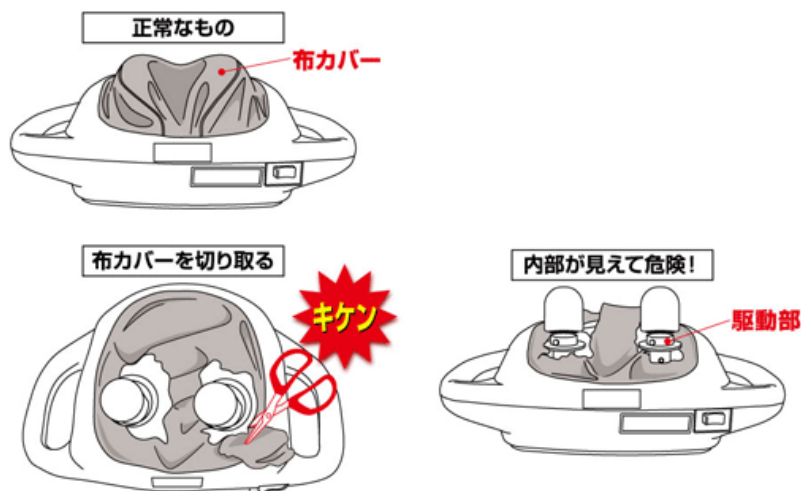

6) 販売台数、対象期間

- ① もみ太くん MK-1 昭和58年5月から平成7年8月 約20万台
② ハンディーマッサージャー GM-2 平成7年4月から平成15年8月 約11万台

7) 販売場所

全国の百貨店、スーパー等の催事場、及び取引先展示会、通信販売

8) 注意喚起の方法

- ① 報道機関に対してニュースリリース。
② 弊社ホームページに注意喚起のお知らせ。
③ 弊社全製品の修理を実施した際に注意喚起の案内。

9) 現在製造中の類似機種

製造しておりません。

添付資料

ハンディーマッサージャー GM-2 取扱説明書抜粋

参考：会社概要

社 名 : 株式会社 フジ医療器
住 所 : 大阪市中央区農人橋1丁目1番22号 大江ビル14階
代表者 : 木原 定男
事業内容 : 医療機器の製造販売、製造、健康・美容機器の販売
資本金 : 15億6000万円
創 業 : 昭和29年4月

＜お客様からのお問い合わせ先＞

株式会社フジ医療器 お客様相談窓口

TEL: 0120-027-612 FAX:06-6644-9103

受付 : 月曜～金曜 午前9時～午後5時30分

※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

※FAXでの受付は24時間行っておりますが、

お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

＜報道関係者の お問い合わせ先＞

株式会社フジ医療器 経営企画室 TEL: 06-4793-0645

担当: 岩井 宏之

受付 : 月曜～金曜 午前9時～午後5時30分

以上

《ハンディーマッサージャー GM-2 取扱説明書抜粋》

△注意

ひじ・ひざ・頭部などの骨・関節部には使用しないでください。

ケガをしたり、体調不良をおこすことがあります。



禁止

スイッチを入れて動かしてから、マッサージしたい箇所に当ててください。

体に当ててから急に動かすと、ケガの原因になることがあります。



警告

本体の上に立っての使用はしないでください。

事故や故障の原因になります。



禁止

落としたり、踏みだり等の強い衝撃を与えないでください。

ケガや故障の原因になります。



禁止

治療目的以外に使用しないでください。

事故や故障の原因になります。



禁止

他の治療器と同時に使用しないでください。



禁止

使用時間は1回15分以内にしてください。

長時間の連続使用は、筋肉や神経を傷める逆効果をまねくことがあります。



15分以内

お願い ●同一箇所への使用は5分以内に、1日の使用は30分以内にしてください。

使用中に身体に異常を感じたとき（気分が悪くなるなど）は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

症状が悪くなることがあります。



使用中止

使用中は眠らないでください。

無意識での使用は、ケガや体調不良の原因になります。



禁止

布団の中で使用する等、通風の悪い状態にしないでください。

火災等の事故や故障の原因になります。



禁止


布カバーが破れたり、外れた状態では使用しないでください。

ケガや感電の原因になります。



禁止

各部の名称

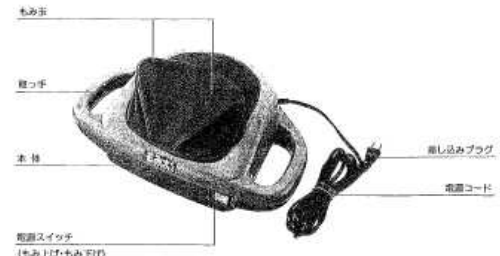

効能・効果

あんま代用
使用時
血行をよくする
筋肉の疲れをとる
関節のこりをほくす
肩こり・首の痛み・腰痛

ご使用方法

①本体の電源コードの差し込みプラグをご家庭のコンセントに差し込みます。



②電源スイッチを「もみ上げ」か「もみ下げ」にすれば作動します。

③取っ手を持つなどして、マッサージしたい箇所に当ててください。

お願い 痛くない、「気持ちいい」強さでご利用ください。

④ご使用後は必ず電源スイッチを「切」にしてから、コンセントより差し込みプラグを抜いてください。



△注意

スイッチを入れて動かしてから、マッサージしたい箇所に当ててください。

体に当ててから急に動かすと、ケガの原因になることがあります。



△注意

使用後は本体の電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

経年劣化による感電や火災の原因になることがあります。



プラグを抜く

